


医療用品（４）整形用品  
一般医療機器 救急絆創膏  
JMDNコード 34864000  
**オーキューバンエコ™**

再使用禁止

**【禁忌・禁止】**  
再使用禁止

**【形状・構造及び原理等】**

本品は、ポリエチレンフィルム基材にアクリル系粘着剤を塗布したテープと、不織布パッドからなる救急絆創膏である。  
本品は滅菌済みである。

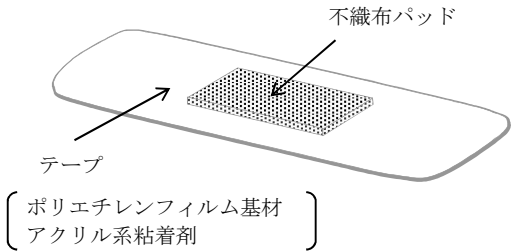

**【保管方法及び有効期間等】**

保管方法：水濡れに注意し、高温、多湿、直射日光のあたる場所を避けて、室温保存する。  
使用期限：個箱に表示（自己認証データによる）

**\*【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】**

〔製造販売元〕  
ニチバン株式会社  
〒112-8663 東京都文京区関口2-3-3

〔お問い合わせ窓口〕  
ニチバン株式会社 お客様相談室  
TEL 0120-377-218  
受付時間：9:00～12:00、13:00～17:00（土・日・祝日を除く）

TM: trademark

＊＊

|            | テープ        | パッド        |
|------------|------------|------------|
| Sサイズ       | 12mm×55mm  | 7.5mm×17mm |
| Mサイズ       | 21mm×70mm  | 13mm×22mm  |
| Lサイズ       | 30mm×72mm  | 22mm×29mm  |
| フリーサイズ     | 76mm×250mm | 30mm×250mm |
| キャラクター(円型) | 直径30mm     | 13mm×13mm  |

**【使用目的又は効果】**

傷の被覆及び保護、傷口の皮膚接合、身体の創傷部位の支持等に用いる。

**【使用方法等】**

包装を開いて本品を取り出し、創部にパッドをあてて周りのテープを伸ばさずに貼付する。

**【使用上の注意】**

**1.重要な基本的注意**

- 1) 本品の使用中に、貼付部位に感染又は皮膚障害（発疹・発赤、水疱、皮膚剥離、かゆみ等）が起きた場合には、使用を中止し、適切な治療を行うこと。
- 2) 本品の使用中に、濡れたり汚れたりした場合、もしくは血液や浸出液などのにじみがみられた場合は、直ちに新しいものと貼りかえること。

**2.その他の注意**

- 1) 本品は開封後、直ちに使用すること。
- 2) 本品をはがす時は、皮膚を傷めないよう体毛の流れに沿ってゆっくりはがすこと。