

医療用品（４）整形用品
一般医療機器 救急絆創膏
JMDNコード 34864000
チューシャバン™
CHUSHAVAN™

再使用禁止

【禁忌・禁止】

再使用禁止

＊ ＊ 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

〔製造販売元〕

ニチバン株式会社

〒112-8663 東京都文京区関口2-3-3

＊ ＊ 【形状・構造及び原理等】

本品は、パルプ・ポリエステル不織布基材にアクリル系粘着剤を塗布したテープと、不織布パッドからなる静脈注射、採血、予防注射、関節穿刺後の穿刺部被覆保護材である。
本品は滅菌済みである。


〔お問い合わせ窓口〕

ニチバン株式会社 お客様相談室

TEL 0120-377-218

受付時間：9:00～12:00、13:00～17:00（土・日・祝日を除く）

TM: trademark

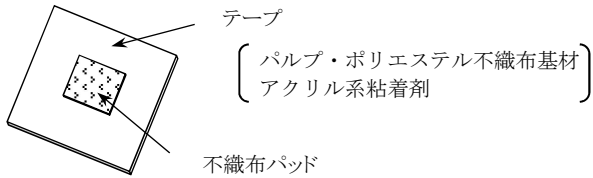

品番	サイズ	
	テープ	パッド
Sサイズ	20mm×20mm	8mm×8mm
Mサイズ	27mm×27mm	13mm×13mm
Lサイズ	35mm×35mm	20mm×20mm

【使用目的又は効果】

傷の被覆及び保護、傷口の皮膚接合、身体の創傷部位の支持等に用いる。

【使用方法等】

包装を開いて本品を取り出し、穿刺部にパッドをあてて周りのテープで固定する。

【使用上の注意】

1.重要な基本的注意

- ＊ 1) 本品の使用中に、貼付部位に感染又は皮膚障害（発疹・発赤、水疱、皮膚剥離、かゆみ等）と思われる症状が現れた場合は、使用を中止し、適切な治療を行うこと。
- 2) 本品の使用中に、濡れたり汚れたりした場合、もしくは血液や滲出液などの漏れがみられた場合は、直ちに新しいものに貼りかえること。

2.その他の注意

- 1) 開封後は、直ちに使用すること。
- 2) 使用後は、皮膚を傷めないよう体毛の流れに沿ってゆっくりはがすこと。

【保管方法及び有効期間等】

保管方法：水濡れに注意し高温、多湿、直射日光のあたる場所を避けて、室温保存する。

使用期限：個箱に表示（自己認証データによる）