

*2021年6月第3版（部）
2016年9月第2版（新記載要領に基づく改訂）

医療機器届出番号 13B2X00218131181


医療用品（4）整形用品
一般医療機器 救急絆創膏
JMDN コード 34864000
注射パッチ

再使用禁止

【禁忌・禁止】
再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

本品は、パルプ・ポリエステル不織布基材にアクリル系粘着剤を塗布したテープと、不織布パッドからなる静脈注射、採血、予防注射、関節穿刺後の穿刺部被覆保護材（救急絆創膏）である。
本品は滅菌済みである。

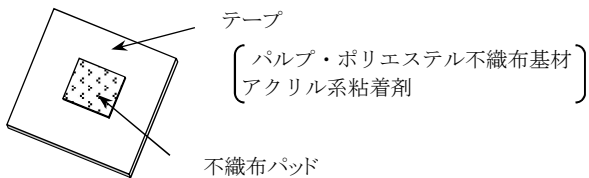

品番	サイズ	
	テープ部	パッド部
MW01001S	20mm×20mm	8mm×8mm
MW01001M	27mm×27mm	13mm×13mm
MW01001L	35mm×35mm	20mm×20mm

【使用目的又は効果】

傷の被覆及び保護、傷口の皮膚接合、身体の創傷部位の支持等に用いる。

【使用方法等】

包装を開いて本品を取り出し、穿刺部にパッドをあてて周りのテープで固定する。

【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意

- *1) 本品の使用中に、貼付部位に感染又は皮膚障害（発疹・発赤、水疱、皮膚剥離、かゆみ等）と思われる症状が現れた場合は、使用を中止し、適切な治療を行うこと。
- 2) 本品の使用中に、濡れたり汚れたりした場合、もしくは血液や滲出液などの漏れがみられた場合は、直ちに新しいものに貼りかえること。

2. その他の注意

- 1) 本品は開封後、直ちに使用すること。
- 2) 本品をはがす時は、皮膚を傷めないよう体毛の流れに沿ってゆっくりはがすこと。

【保管方法及び有効期間等】

保管方法：水濡れに注意し高温、多湿、直射日光のあたる場所を避けて、室温保存する。
使用期限：個箱に表示（自己認証データによる）

***【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】**

[販売元]
株式会社 メディセオ
エム・シー・ヘルスケア株式会社

[製造販売元]
ニチバン株式会社
〒112-8663 東京都文京区関口2-3-3

[お問い合わせ窓口]
ニチバン株式会社 お客様相談室
TEL 0120-377-218
受付時間：9:00～12:00、13:00～17:00（土・日・祝日を除く）