

医療用品（4）整形用品
一般医療機器 医療用不織布
JMDNコード 34655000
滅菌パッド
STERILE PAD


再使用禁止

【禁忌・禁止】

再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

本品は、レーヨン不織布と孔付ポリエチレンフィルムからなる医療用不織布である。
本品は滅菌済みである。

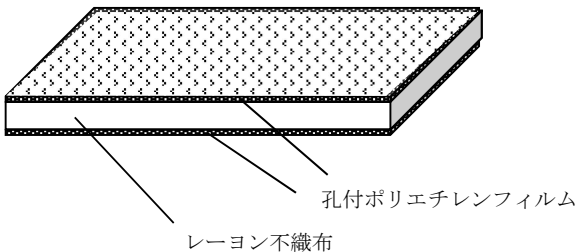

品番	寸法
YMS	50mm×50mm
YMM	60mm×75mm
YML	80mm×100mm

【使用目的又は効果】

創傷又は外科切開部を処置するために用いる。

【使用方法等】

包装を開いて本品を取り出し、創傷又は外科切開部を被覆・保護する。

【使用上の注意】

1.重要な基本的注意

- * 1) 本品の使用中に、適用部位に感染又は皮膚障害（発疹・発赤、水疱、皮膚剥離、かゆみ等）と思われる症状が現れた場合は、使用を中止し、適切な治療を行うこと。
- 2) 本品の使用中に、濡れたり汚れたりした場合、もしくは血液や滲出液などの漏れがみられた場合は、直ちに新しいものに貼りかえること。

2.その他の注意

- 1) 開封後は、直ちに使用すること。

【保管方法及び有効期間等】

保管方法：水濡れに注意し、高温、多湿、直射日光のあたる場所を避けて、室温保存する。

使用期限：個箱に表示（自己認証データによる）

*** 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】**

[製造販売元]

ニチバン株式会社

〒112-8663 東京都文京区関口2-3-3

[お問い合わせ窓口]

ニチバン株式会社 お客様相談室

TEL 0120-377-218

受付時間：9:00～12:00、13:00～17:00（土・日・祝日を除く）