

医療用品（４）整形用品
一般医療機器 手術用被覆・保護材（救急絆創膏）
JMDNコード 34654000（34864000）

サージフィット™

SURGIFIT™

再使用禁止


【禁忌・禁止】

再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

本品は、伸縮性ポリウレタンフィルム基材にウレタン系粘着剤を塗布した透明なテープと、創部を観察するための開孔部を設けた吸水性のある不織布パッドからなる防水性のドレッシング材である。

本品は滅菌済みである。

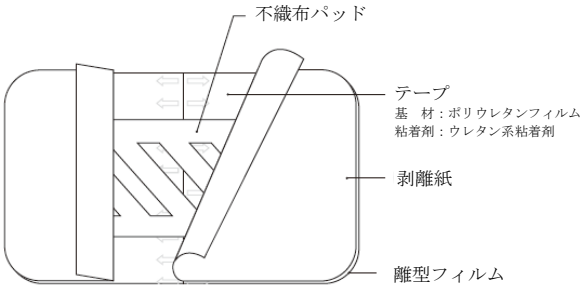

品番	サイズ	
	テープ	パッド
SRG0607	60mm×70mm	30mm×35mm
SRG0610	60mm×100mm	30mm×65mm
SRG0915	90mm×150mm	50mm×100mm
SRG0921	90mm×210mm	50mm×160mm
SRG0927	90mm×270mm	50mm×210mm
SRG0933	90mm×330mm	50mm×280mm

【使用目的又は効果】

1. 手術用被覆・保護材用途

術後創傷の被覆・保護に用いる。

2. 救急絆創膏用途

傷の被覆及び保護、傷口の皮膚接合、身体の創傷部位の支持等に用いる。

【使用方法等】

準備：

- 1) 創部及びその周辺の皮膚を洗浄・消毒し、皮膚をよく乾かす。
- 2) 創部にあったサイズを選択し、使用する直前に包装を開封する。

貼付：

- 1) 大きい方の剥離紙をゆっくり剥がす。
- 2) 創部にパッドを当てて、残りの剥離紙を剥がし、周りのテープで固定する。
- 3) 粘着面を皮膚に密着させた後、離型フィルムをゆっくり剥がす。

除去：

- 1) 創部や皮膚を傷めないよう、体毛の流れに沿ってゆっくり剥がす。

【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意

- 1) 感染創もしくは感染が疑われる部位には使用しないこと。
- 2) 本品の使用中に、貼付部位に感染又は皮膚障害（発疹・発赤、水疱、皮膚剥離、かゆみ等）と思われる症状が現れた場合は、直ちに使用を中止し、適切な治療を行うこと。
- 3) 本品を再滅菌しないこと。

2. その他の注意

- 1) 本品の使用中に、血液や滲出液などの漏れや、テープの剥がれがみられた場合は、直ちに新しいものに貼りかえること。
- 2) シャワーや入浴の前に、テープの剥がれやパッドに達するシワがなく、全面が皮膚に密着していることを確認すること。
- 3) 本品を剥がした後、パッド部の残留物が皮膚に残った場合、生理食塩水等を染み込ませたガーゼ等を用いて除去すること。
- 4) 本品を剥がした後、パッドの開孔部と同じ形の圧痕がみられることがあるが、これは異常ではなく、通常は数時間で消失する。

【保管方法及び有効期間等】

保管方法：水濡れに注意し、高温、多湿、直射日光のあたる場所を避けて、室温保存する。

使用期限：個箱に表示（自己認証データによる）

***, **【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】**

〔製造販売元〕

ニチバン株式会社

〒102-8811 東京都千代田区麹町5-1

〔お問合わせ窓口〕

ニチバン株式会社 お客様相談室

電話 0120-377-218

受付時間：9:00～12:00、13:00～16:00（土・日・祝日を除く）

TM: trademark