

*機械器具（29）電気手術器
一般医療機器 単回使用電極クリーナ 70654000

Bovie スクラッチパッド


再使用禁止

【禁忌・禁止】

- (1) 再使用禁止
- (2) 再滅菌禁止

【形状・構造及び原理等】

1. 形状・構造

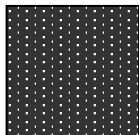

2. 原理

やすりで擦ることにより、電極※に付着した炭化物を取り除くことができる。

※本品には含まれない。

【使用目的又は効果】

本品は、電極を使用した際、電極に付着した炭化物等を除去するためのクリーナである。

【使用方法等】

- (1) 本品は滅菌済みなので、包装を無菌的に開封すれば直ちに使用することができる。
- (2) 保護フィルムを剥がし、ドレープ等※に貼り付ける。
- (3) 電極※に付着した炭化物等の付着物をやすりで擦って除去する。

※本品には含まれない。

【使用上の注意】

1. その他の注意

- (1) 本品には無理な力を加えないこと〔本品の損傷又は機能低下のおそれがある〕。

【保管方法及び使用期間等】

1. 保管の条件

高温になる場所や直射日光は避け、乾燥した清潔な場所に保管すること。

2. 使用期限

4 年〔自己認証（当社データ）による〕
使用期限については直接の包装及び外装に記載。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

【製造販売業者】

日機装株式会社
Tel. 03-3443-3751

【製造業者】

Bovie Medical Corporation（ボビーメディカル社）
国名：USA（アメリカ合衆国）