

ニプロネラトンカテーテル

再使用禁止


【禁忌・禁止】

1. 再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

1. 形状・構造

本品は、主に導尿、膀胱内洗浄、排液導管、喀痰吸引の目的に用いる。

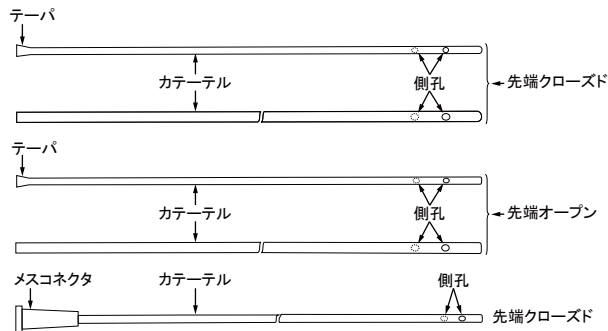

2. 材質

カテーテル、メスコネクタ：ポリ塩化ビニル
ポリ塩化ビニルの可塑剤はフタル酸ジ-2-エチルヘキシルである。

【使用目的又は効果】

本品は滅菌済みであるので、そのまま直ちに使用できる。

【使用方法等】

1. 使用方法

1) 導尿に用いる場合

- (1) 包装を開封し、汚染に十分注意して、カテーテルを取り出します。
- (2) カテーテルに潤滑剤を塗布します。
- (3) カテーテルを把持して、尿道口に挿入します。
- (4) 尿が完全に流出したら、静かにカテーテルを抜去します。

2) 分泌物吸引に用いる場合

- (1) 包装を開封し、汚染に十分注意して、カテーテルを取り出します。
- (2) 接続部にコネクタ、又は注射筒をしっかりと接続します。
- (3) 目的の場所にカテーテルを挿入したら、カテーテル内に吸引圧を加えると同時に、先端をくるくると回しながら吸引します。

＜使用方法等に関連する使用上の注意＞

1. 接続部への体液や薬液等の付着に注意してください。〔接続部の緩みのおそれがあります。〕
2. カテーテル挿入に抵抗がある場合は、カテーテルを抜いて、原因を解消した後、もう一度挿入し直してください。
3. カテーテルを挿入する際は、挿入部位への入れすぎに注意してください。〔カテーテルを抜去できなくなるおそれがあります。〕
4. カテーテルを抜去する際は、ゆっくりと引き抜いてください。〔粘膜損傷のおそれがあります。〕

【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意

- 1) 脂溶性の医薬品ではポリ塩化ビニルの可塑剤であるフタル酸ジ-2-エチルヘキシルが溶出するおそれがあるので注意すること。
- 2) 使用中は本品の破損、接続部の緩み、空気混入、液漏れ及び詰まり等について、十分注意すること。
- 3) カテーテルが折り曲げられたり、引張られた状態で使用しないこと。
- 4) カテーテルとコネクタ等の接続部には過度に引張る、押し込む、折り曲げるような負荷をかけないように注意すること。〔カテーテルの抜け、破損、伸び等のおそれがある。〕
- 5) 導尿に用いる場合は以下の事項を順守すること。
 - (1) カテーテル挿入時は尿道等挿入する部位の粘膜への損傷に十分注意すること。
 - (2) 排尿が確認できない場合は、カテーテルが閉塞していないこと及びカテーテルが折れていないことを確認すること。
- 6) 分泌物吸引に用いる場合は以下の事項を順守すること。
 - (1) カテーテルの気管内挿入時には、歯、鼻甲介等及び鋭い器具等でカテーテルに傷をつけないよう注意すること。〔液漏れ、空気混入や破損のおそれがある。〕
 - (2) 気管内チューブにカテーテルを挿入する場合は、気管内チューブ内径に合ったカテーテルサイズを選択すること。
- 7) 体動等でねじれると流路が閉塞するおそれがあるので注意すること。

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法

水ぬれに注意し、直射日光、高温多湿を避けて保管すること。

2. 有効期間

包装の使用期限欄を参照のこと。

有効期間：滅菌後3年（自己認証による）

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売（お問い合わせ先）

ニプロ株式会社

電話：06-6372-2331（代表）

製造（輸入先）

ニプロ（上海）有限公司

[NIPRO(SHANGHAI)CORPORATION LIMITED]

中華人民共和国

[People's Republic of China]



ニプロ株式会社