

ペンニードル®

再使用禁止


【禁忌・禁止】

- 再使用禁止
- 他の人が使用した本品を絶対に使用しないこと。[感染症の原因となることがある。]
- 曲がってしまった針は使用しないこと。[曲がった状態で、又は曲がった針を元に戻して注射すると、針が折れ、破断した針が体内に残留することがある。]

【形状・構造及び原理等】

<各部の名称>

本品はインスリン注射又は成長ホルモン注射に使用される使い捨ての滅菌済み注射針であり、注射針、針キャップ、針ケース、保護シールから構成されている。

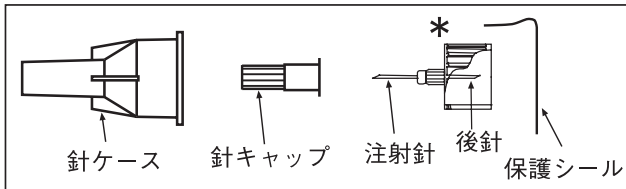

外径:0.30mm(30G)、0.23(先端部)／0.25(基部)mm(32Gテーパー)
針材質:ステンレス鋼 注射針の形式:JIS A形(型)

32Gテーパーは、注射針の先端部が先に向かうに従い細くなるように加工(テーパー加工)されており、先端部外径は32Gとなっている。

本品はJIS A形(型)注射針に対応する注入器とともに使用する。

【使用目的、効能又は効果】

専用医薬品カートリッジとともに取り付け、皮下へ医薬品を注入する針である。

【操作方法又は使用方法等】

- (1) 針ケースの保護シールを剥がす。
[注意] 保護シールが破損している場合は使用しないこと。
[注意] 保護シールを剥がした後、注射針の後針が曲がっている又は折れている場合は使用しないこと。
- (2) 針ケースごと専用薬液カートリッジ又は専用注入器に装着する。
[注意] 針ケースごとまっすぐに装着すること。[斜めに付けると後針が曲がりまたは折れて薬液が出なくなることがある。]
- (3) 注射針の針先が上向き又は横向きになるようにして持つ。
- (4) 針ケースを外し(後で使用する)、針キャップを外す(破棄する)。
[注意] 針キャップは、注射針からまっすぐ抜いて取り外すこと。[針キャップの壁面に注射針が接触すると針が曲がることや折れることがある。]
[注意] 注射針が曲がっている又は折れている場合は使用しないこと。
- (5) 空打ちを行い、針先から薬液が出ることを確認する。
- (6) 注射を行う。
[注意] 注射針は皮膚面に対し、真上からまっすぐに刺し、穿刺時の状態を保持しながら薬液を注入すること。[穿刺時や薬液注入時にぶれが生じると、注射針が曲がり、破断することがある。]
[注意] 使用後注射針を外す時、針キャップは付けないで針ケースをまっすぐ付けること。[斜めに付けると針が針ケースを突き抜けることがある。]

[注意] 使用後は注意して廃棄すること。医療機関で収集し廃棄する場合は、感染性廃棄物として処理すること。

【使用上の注意】

<重要な基本的注意>

- 注射前の取り扱いにおいて、注射針には触れないこと。
- 針キャップの取り外し後は、衣服等への針の接触により注射針を曲げたり傷つけたりすることがないように十分注意すること。
- 誤って自分や他の人を針で傷つけないように十分注意すること。
- 使用期限を過ぎた本品は使用しないこと。
- 空打ちを行い、薬液が出ることを確認すること。
- 取り扱い方法は使用する注入器の使用説明書を参照すること。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

<貯蔵・保管方法>

水濡れや、直射日光、高温多湿を避けて保管すること。

<使用期限>

包装又は保護シールに記載の使用期限を参照のこと。[自己認証(当社データ)による]

【包装】

1箱 30G 8mm 70本入
32Gテーパー 6mm 70本入

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売元

ニプロ株式会社
〒531-8510 大阪市北区本庄西3丁目9番3号
電話:06-6372-2331(代表)

製造元

ニプロ医工株式会社

販売元

ノボ ノルディスク ファーマ株式会社
〒100-0005 東京都千代田区丸の内2-1-1

(お問い合わせ先)

ノボ ノルディスク ファーマ株式会社 ノボケア相談室
電話:0120-180363(フリーダイヤル)
受付:月曜日から金曜日まで(祝祭日・会社休日を除く)
午前9時～午後6時

ペンニードル®は Novo Nordisk A/Sの登録商標です。

