

真空採血管

再使用禁止

【禁忌・禁止】

1. 再使用禁止
2. 本品を使用して採血した血液を人体に戻さないこと。〔採取した血液の安全性が確保できていないため。〕
3. 本品による採血は耐圧性能を有するゴムスリーブ付採血針及び単回使用採血ホルダとの組み合わせ以外では行わないこと。
4. 採血管が室内温度に戻らないうちに採血を行わないこと。
〔採血管の温度により採血管内の圧力が変化し、採血管内の内容物等が患者の体内に逆流するおそれがある。〕
5. 採血管を抜くまで、被採血者の腕の血管の圧迫を解除したり、動かしたりしないこと。〔圧迫を解除した際、あるいは腕の配置によっては静脈圧が急激に低下し、採血管内の内容物等が患者の体内に逆流するおそれがある。〕
6. 採血管に血液が流入し始めた後は、採血ホルダに押し込むような力を採血管に加えないこと。〔採血管内の圧力が変化し、採血管内の内容物等が患者の体内に逆流するおそれがある。〕
7. 採血終了後、採血管に採血針が刺さったままの状態で駆血帯を外さないこと。〔駆血帯を外すことによる圧力の変動により、採血管内の内容物等が患者の体内に逆流するおそれがある。〕
8. ホルダは患者ごとの使用とし、使用後は廃棄すること。
〔ホルダに血液が付着した場合は、交差感染のおそれがあるため。〕
9. 体外循環回路又は中心静脈から採血を行わないこと。〔圧力の変動により、採血管内の内容物等が患者の体内に逆流するおそれがある。〕

【形状・構造及び原理等】

本品は各種臨床検査等に必要の血液等採取する器具で、ポリエチレンテレフタレート（PET）製試験管、ゴム栓からなる。管内に種々の薬剤や部材を含む場合がある。尚、本品はガンマ線滅菌済みである。


【使用目的又は効果】

血液検査のため、血液検体の採取、輸送又は保管に用いる。

【使用方法等】

1. 室内温度になった採血管を準備してください。
2. 採血針のキャップを外し、ホルダに確実に固定してください。また、ホルダと一体型の採血針を用いる場合は嵌合にゆりみがないことを確認してください。
3. 駆血帯をかけた後に、皮膚の消毒等をしてください。
4. 採血針のコンテナーをまっすぐ引いて外し、血管へ穿刺してください。また、ルアーチップタイプを用いる場合は他の医療機器と確実に接続してください。
5. 採血管はホルダにまっすぐ完全に押し込んでください。規定量の血液が採れるまでこの状態を保ってください（図1）。
6. 採血の血流が停止したら、直ちに採血管をホルダから外してください。
〔注意〕採血時の環境（血圧、温度）により採血量が変動する場合があります。
7. 取り外した本品は、速やかにかつ穏やかに5～6回程度、転倒混和してください。
〔注意〕転倒混和が不十分な場合、凝固不良が発生するおそれがあります。
〔注意〕このとき激しく振らないでください。

8. 連続採血する場合は、ホルダを固定したまま本品を取り替えてください。
9. 採血終了後、採血管をホルダから抜去した後に駆血帯を外してください（図2）。
10. 注意して採血針を抜去し、止血してください。

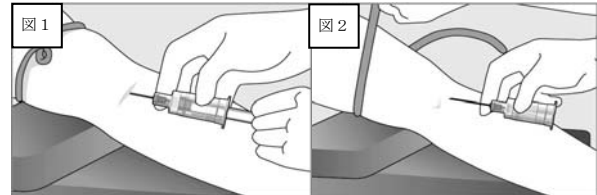

【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意

- 1) 患者の腕及び採血管が採血中常に下向きであることを確認すること。
- 2) 翼付針チューブを使用して採血する際は、採血管の位置が上下に動かないようにすること。
- *3) 遠心分離後の検体を凍結保存等する場合には、そのまま保存せず、血清や血漿を別容器に移し替えて保存すること。
〔検査値に影響を及ぼすおそれがある。〕
- 4) ゴム栓を取り注射器より血液を移す場合には、注射針を取り去り、管壁に沿わせながらゆっくりと注入すること。
- 5) 使用期限内でも採血量が衰退するおそれがある。〔採血管内部へ大気中の気体分子（窒素、酸素等）が浸透し、減圧度が低下する現象によるが、使用期限内における採血量は規格内であり性能に問題はない。〕
- **6) アルミ包装品は開封後速やかに使用すること。〔採血管内へ大気中の水分子が浸透し、採血管内の内容物が吸湿してしまうことで外観上内容物が見えにくくなる現象が発生するおそれがあるが、検査値に影響はない。〕
- 7) 使用後は感染防止に留意し安全な方法で廃棄すること。

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法

水ぬれに注意し、直射日光、高温多湿を避けて保管すること。

2. 有効期間

包装の使用期限を参照のこと（自己認証による）。

*有効期間：滅菌後1.5年

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売（お問い合わせ先）

ニプロ株式会社

電話番号：06-6372-2331（代表）

製造（輸入先）

ニプロ（上海）有限公司

〔NIPRO(SHANGHAI) CORPORATION LIMITED〕

中華人民共和国

〔People's Republic of China〕



ニプロ株式会社