

機械器具 51 医療用嘴管及び体液誘導管
一般医療機器 吸引チューブ 16779000

ニプロコネクティングチューブ

再使用禁止

【禁忌・禁止】


1. 使用方法
1) 再使用禁止

【形状・構造及び原理等】


1. 形状・構造

本品は、各種の器具及びカテーテル、チューブに接続して体液及び気体を流通するのに用いられるチューブである。


1) Fタイプ

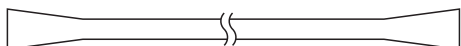

2) Fタイプ

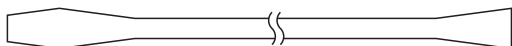

3) Sタイプ

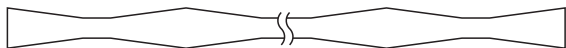

品番	直線部 外径	接続部 最大径	全長
NCT-F0-18	9.6mm	10～20mm	182cm
NCT-T0-18			
NCT-T1-18	6.9mm		

2. 材質

チューブ	ポリ塩化ビニル
------	---------

ポリ塩化ビニルの可塑剤はフタル酸ジ-2-エチルヘキシルである。

*【使用目的又は効果】

吸引器と回収容器との接続に用いる柔軟性のあるプラスチック製のチューブである。

【使用方法等】

1. 包装を開封し、本品を取り出します。
2. 接続機器の接続口、接続するカテーテル、チューブのファネル部に適合するチューブを選択します。
3. しっかりと接続します。

<使用方法等に関連する使用上の注意>

1. 接続部への体液や薬液等の付着に注意してください。〔接続部の緩み等が発生するおそれがあります。〕

【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意

- 1) 使用中は本品の破損、接続部の緩み、液漏れ及び詰まり等について、定期的に確認すること。
- 2) 本品は脂溶性溶剤存在下で塩化ビニルの可塑剤であるフタル酸ジ-2-エチルヘキシルが溶出するおそれがある。
- 3) 体動でねじれると流路が閉塞するおそれがあるので注意すること。

2. 不具合・有害事象

- 1) その他の不具合
 - (1) 本品の破損
 - (2) 接続部の緩み
 - (3) 液漏れ
 - (4) 詰まり

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法

水ぬれに注意し、直射日光、高温多湿を避けて保管すること。

2. 有効期間

包装の使用期限欄を参照のこと。

有効期間：滅菌後3年〔自己認証（自社データ）による〕

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

*製造販売（問い合わせ先）

ニプロ株式会社

フリーダイヤル：0120-226-410

受付時間：9:00～17:15（土・日・祝日を除く）

製造

ニプロ株式会社



ニプロ株式会社