

機械器具 51 医療用嘴管及び体液誘導管
一般医療機器 吸引チューブ 16779000

ニプロスネークチューブ

再使用禁止


【禁忌・禁止】

1. 使用方法
- 1) 再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

**1. 形状・構造

本品は各種の器具及びカテーテル、チューブに接続して体液及び気体を流通するのに用いられるチューブである。

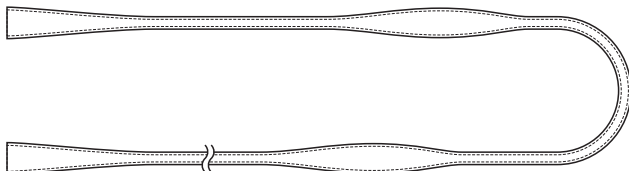

品番		内径	外径	全長
NSK-0	平行部	6.9mm	9.6mm	30m
	ファネル部	10.4mm	14.4mm	
NSK-1	平行部	4.8mm	6.9mm	
	ファネル部	9.3mm	12.9mm	
NSG	平行部	3.2mm	5.1mm	
	ファネル部	8.0mm	11.0mm	

2. 材質

チューブ	ポリ塩化ビニル
------	---------

ポリ塩化ビニルの可塑剤はフタル酸ジ-2-エチルヘキシルである。

*【使用目的又は効果】

吸引器と回収容器との接続に用いる柔軟性のあるプラスチック製のチューブである。

【使用方法等】

1. 包装を開封し、本品を取り出します。
2. 接続機器の接続口、接続するカテーテル、チューブのファネル部に適合するチューブを選択します。
3. 必要な長さに切断し、緩みや外れが生じないようにしっかりと接続します。

<使用方法等に関連する使用上の注意>

1. 接続部への体液や薬液等の付着に注意してください。〔接続部の緩み等のおそれがあります。〕

【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意

- 1) 未滅菌品のため、体外での排液・排気カテーテルの延長以外には使用しないこと。
- 2) 脂溶性の医薬品等ではポリ塩化ビニルの可塑剤であるフタル酸ジ-2-エチルヘキシルが溶出するおそれがあるので注意すること。
- 3) 使用中は本品の破損、接続部の緩み、液漏れ及び詰まり等について、定期的に確認すること。
- 4) チューブが折り曲げられたり、引っ張られた状態で使用しないこと。
- 5) 体動でねじれると流路が閉塞するおそれがあるので注意すること。

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法

水ぬれに注意し、直射日光、高温多湿を避けて保管すること。

2. 有効期間

包装の使用期限欄を参照のこと。

有効期間：製造後3年〔自己認証（自社データ）による〕

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

*製造販売（お問い合わせ先）

ニプロ株式会社

フリーダイヤル：0120-226-410

受付時間：9:00～17:15（土・日・祝日を除く）

製造

ニプロ株式会社



ニプロ株式会社