

ニプロコネクター

再使用禁止

【禁忌・禁止】

1. 使用方法
1) 再使用禁止

【形状・構造及び原理等】


1. 形状・構造
1) NCN-S




- 2) NCN-F




- 3) NCN-Y0

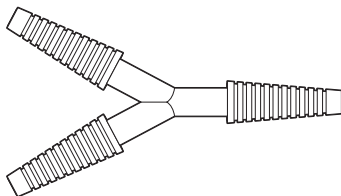

- 4) NCN-Y1

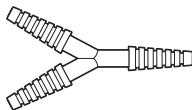

- 5) NCN-T0

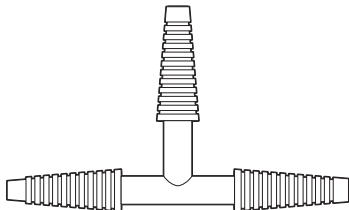

【使用目的又は効果】

カテーテルを容器等の別の対象物に接続したり、灌注又は排液用カテーテルを身体に挿入するために用いる器具である。

【使用方法等】

1. 包装を開封し、本品を取り出します。
2. 接続するカテーテル、チューブのファネル部に適合するコネクタを選択します。
3. カテーテルやチューブと接続します。

＜使用方法等に関連する使用上の注意＞

1. 接続部への体液や薬液等の付着に注意してください。〔接続部の緩み等のおそれがあります。〕

【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意

- 1) 使用中は本品の破損、接続部の緩み、空気混入、液漏れ及び詰まり等について、定期的に確認すること。
- 2) 本品は合成樹脂製品のため、温度が低下するにつれて強度が低下することから取扱いには注意すること。〔破損のおそれがある。〕

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法

水ぬれに注意し、直射日光、高温多湿を避けて保管すること。

2. 有効期間

包装の使用期限欄を参照のこと。
有効期間：滅菌後3年〔自己認証（自社データ）による〕

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

*製造販売（お問い合わせ先）

ニプロ株式会社

フリーダイヤル：0120-226-410

受付時間：9:00～17:15（土・日・祝日を除く）

製造

ニプロ株式会社

規格	適合チューブ内径	形態
NCN-S	6.3～12.5mm（太径）	ストレート、大⇄小
	3.1～6.3mm（細径）	
NCN-F	6.3～12.5mm	ストレート、大⇄大
NCN-Y0	6.3～12.5mm	Y字、大
NCN-Y1	3.1～6.3mm	Y字、小
NCN-T0	6.3～12.5mm	T字、大

2. 材質

本体	ポリプロピレン
----	---------



ニプロ株式会社