

スリムドレーンコネクタ

再使用禁止

【禁忌・禁止】

1. 使用方法

1) 再使用禁止


【形状・構造及び原理等】

1. 形状・構造


本品は、U K ドレーンカテーテルを吸引装置、又は排液バックに接続するための専用コネクタである。

*1) 持続吸引器用コネクタ


(1) ストレートタイプ

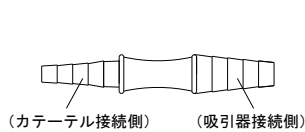

(2) Yタイプ

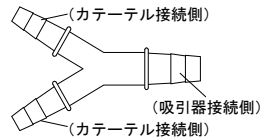

*2) バック用コネクタ

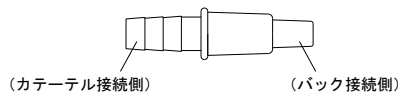

【使用目的又は効果】

本品は、体内（胸腔、腹腔あるいは創部）に貯留した血液、膿、滲出液等を体外へ排出させるために用いる滅菌済みカテーテル製品の接続用コネクタである。

【使用方法等】

1. 使用方法


- 1) 接続するカテーテル、又はチューブ類の径を確認し、しっかりと嵌合させます。

<使用方法等に関連する使用上の注意>

1. カテーテル、又はチューブ類に接続する際は、内径に適合するサイズのコネクタであることを必ず確認してください。
[接続不良による液漏れや外れのおそれがあります。]
- *2. バック用コネクタの向きに注意して、カテーテル及び排液バックと接続してください（図1参照）。


図1

1) カテーテルとバック用コネクタの接続

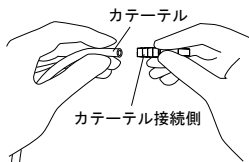


2) バック用コネクタと排液バックの接続

(1) 平型排液バック

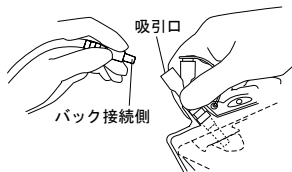

(2) 卵型排液バック

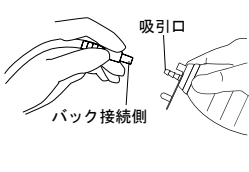

3. 接続後はコネクタがしっかりと嵌合していることを確認し、必要に応じて、結束バンド等の補強策をとってください。

【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意

- 1) 消毒、清拭等の目的で、アルコール、アセトン、ベンジン等の有機溶媒を使用しないこと。[強度低下、破損のおそれがある。]
- 2) 接続したカテーテル、又はチューブ類を鉗子等で閉塞する場合、コネクタを一緒に閉塞しないこと。[破損のおそれがある。]
- 3) 空気除去等の目的で鉗子等の硬いものでコネクタを叩かないこと。[破損のおそれがある。]
- 4) 排液バック等他の製品と接続する場合は、接続の外れや液漏れ等がないことを確認してから使用すること。
- 5) 吸引操作中はエアリークに注意し、排液の量や性状、吸引等異常がないことを確認すること。[カテーテル、又はチューブ類との接続部からのエアリークにより、吸引不良のおそれがある。]

2. 不具合・有害事象

1) その他の不具合

- (1) 接続不良による液漏れ、吸引不良、エアリーク [閉鎖性が維持されなかった場合、吸引不良や空気が体内に流入し、逆行性汚染のおそれがある。]

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法

水ぬれに注意し、直射日光、高温多湿を避けて保管すること。

2. 有効期間

包装の使用期限欄を参照のこと。

有効期間：滅菌後3年 [自己認証 (自社データ) による]

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

**製造販売（お問い合わせ先）

ニプロ株式会社

フリーダイヤル：0120-226-410

受付時間：9:00～17:15（土・日・祝日を除く）

製造

ニプロ株式会社