

ニプロ排液用活栓

再使用禁止


【禁忌・禁止】

1. 使用方法
- 1) 再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

1. 形状・構造

本品はカテーテルと接続し、排液のために使用される。

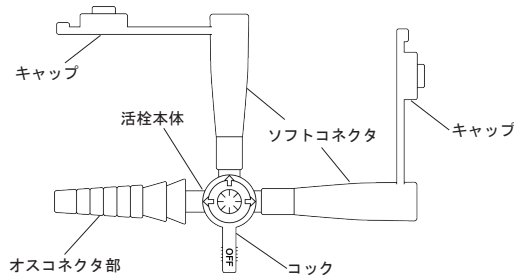

【使用目的又は効果】


カテーテルを容器等の別の対象物に接続するために用いる。

【使用方法等】

1. 汚染に十分注意しながら本品を開封し包装から取り出します。
2. 本品をカテーテル等と確実に接続します。
3. 必要に応じてコックを回転させ、流路を変更します。
4. 使用後は感染防止に留意し、安全な方法で廃棄します。

＜使用方法等に関連する使用上の注意＞

1. 接続部及びコネクタ部には直接手を触れないようにしてください。
2. 接続部への排液等の付着に注意してください。〔接続部の緩み等のおそれがあります。〕
3. 接続部から液漏れ等の異常が認められた場合は使用しないでください。
4. ソフトコネクタと他のコネクタの接続を解除する際は、ソフトコネクタを持って解除してください。
5. コックを必要以上に回転させないでください。〔破損等の原因になります。〕
6. 三方活栓のコックの向きと流路は下図（例図）のとおりです。

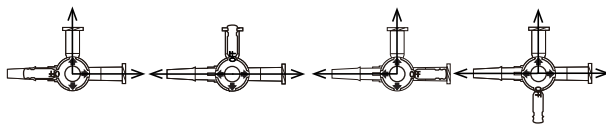

【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意

- 1) 使用中は本品の破損、接続部の緩み、空気混入、液漏れ及び詰まり等について、定期的に確認すること。これらの事象が確認された場合は直ちに新しい製品と交換すること。
- 2) 本品は合成樹脂製品のため、温度が低下するにつれて強度が低下することから取扱いには注意すること。〔破損のおそれがある。〕
- 3) カテーテルを接続する場合は、過度な締め付けをしないこと。〔コネクタから外れなくなる、又はコネクタが破損し、接続部からの液漏れ、空気混入のおそれがある。〕
- 4) 本品に接続するカテーテルが外れないようしっかりと接続すること。また、排液が流れる方向にコックが操作されていることを確認すること。
- 5) コックに対し、引き抜く方向に過度な負荷をかけないこと。〔コックが外れ、液漏れのおそれがある。〕
- 6) 接続するカテーテル等の劣化程度により、接続部が外れやすくなる場合があるため注意すること。
- 7) 使用中に患者の体位転換等により接続部が外れないように注意すること。

2. 不具合・有害事象

- 1) その他の不具合
- (1) 液漏れ
- (2) 本品に接続したカテーテル等の外れ

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法

水ぬれに注意し、直射日光、高温多湿を避けて保管すること。

2. 有効期間

包装の使用期限欄を参照のこと。
有効期間：滅菌後3年〔自己認証（自社データ）による〕

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

*製造販売（お問い合わせ先）

ニプロ株式会社

フリーダイヤル：0120-226-410

受付時間：9:00～17:15（土・日・祝日を除く）

製造

ニプロ株式会社