

機械器具 48 注射筒
一般医療機器 汎用注射筒 13929001

ニプロシリンジ（カテーテルチップ）

再使用禁止


【禁忌・禁止】

1. 使用方法
- 1) 再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

1. 形状・構造

本品は外筒、押子及びガスケットからなる。

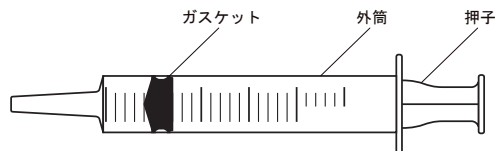

2. 材質

外筒	ポリプロピレン
ガスケット	スチレン系熱可塑性エラストマー

【使用目的又は効果】

液体の注入又は排出のために用いる。

【使用方法等】

1. 包装を開口部より開き、外筒の方を持ち、本品を取り出します。
滅菌されているのでそのまま使用できます。

<使用方法等に関連する使用上の注意>

1. 接続部への薬液等の付着に注意してください。〔接続部の緩み等のおそれがあります。〕
2. コネクタ等と接続する際、筒先に横方向の力をかけないでください。〔筒先の湾曲や破損等のおそれがあります。〕
3. 接続部から液漏れ等の異常が認められた場合は使用しないでください。

【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意

- 1) 本品は経腸栄養用途ではない。
- 2) 静脈等血管系ラインに接続しないこと。
- 3) 使用中は本品の破損、接続部の緩み、空気混入、液漏れ及び詰まり等について、十分に注意すること。
- 4) 押子は真っ直ぐ引くこと。〔斜めに引くと、ガスケットと外筒との密着性が悪くなり、液漏れ、空気混入、又はガスケットが外れるおそれがある。〕
- 5) 外筒印刷部の目盛を超えて押子を引かないこと。〔押子が外筒から抜けて液漏れや空気混入のおそれがある。〕
- 6) 外筒部を強く握る等、圧迫するような負荷をかけないこと。〔圧迫によりガスケットと外筒との密着性が悪くなり、液漏れや空気混入のおそれがある。〕
- 7) コネクタを接続する場合は、過度な締め付けをしないこと。〔コネクタが外れなくなる、又はコネクタの破損、接続部からの液漏れ、空気混入のおそれがある。〕
- 8) 外筒印刷部をこすったり、あるいは薬液がついた状態で放置しないこと。〔目盛等の印刷部が剥がれるおそれがある。〕
- 9) 運搬・操作時には、振動や衝撃に注意すること。
- 10) 本品は合成樹脂製品のため、温度が低下するにつれて強度が低下することから、取扱いに注意すること。〔破損のおそれがある。〕

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法

水ぬれに注意し、直射日光、高温多湿を避けて保管すること。

2. 有効期間

包装の使用期限欄を参照のこと。

有効期間：滅菌後5年〔自己認証（自社データ）による〕

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売（お問い合わせ先）

ニプロ株式会社

フリーダイヤル：0120-226-410

受付時間：9:00～17:15（土・日・祝日を除く）

製造

ニプロ株式会社



ニプロ株式会社