

医療用品 3 手術用手袋及び指サック
一般医療機器 非天然ゴム製検査・検診用手袋 70976000

ニプロAFニトリルグローブ (加硫促進剤フリー、パウダーフリー)

再使用禁止

【禁忌・禁止】

1. 使用方法
- 1) 再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

主 材 料	アクリロニトリルブタジエン系ゴム
表面仕上げ	T（粗面）
コーティング	内面：ポリウレタンコーティング
サイズ	XS, S, M, L, XL

【使用目的又は効果】

手術を除いた検査、検診、治療行為及び汚染された医療材料を取り扱う際、患者及び使用者を交差感染から保護するために使用する。

【使用方法等】

1. 手袋を取り出し、装着して使用します。
2. 使用後は感染防止に留意し、安全な方法で廃棄します。

＜使用方法等に関連する使用上の注意＞

1. 刃物等鋭利な器具に手袋が触れると、破れたり穴が開くことがあるため注意してください。

【使用上の注意】

1. 使用注意（次の患者には慎重に適用すること）

- 1) 製品に含まれる化学物質により、かゆみ、かぶれ、発疹等のアレルギー性症状を起こすことがある。このような症状を起こした場合には、直ちに使用を中止し医師に相談すること。

2. 重要な基本的注意

- 1) 手袋に破損、汚損、ピンホール等の異常が認められる場合は使用しないこと。
- 2) 薬品、溶剤、油脂等を使用する場合は手袋の状態を確認の上使用すること。〔膨潤、浸透、劣化のおそれがある。〕

3. 不具合・有害事象

- 1) その他の不具合
(1) 破損、汚損、ピンホール等
- 2) その他の有害事象
(1) アレルギー症状

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法

水ぬれに注意し、直射日光、オゾン、紫外線、熱源、高温多湿を避けて保管すること。

2. 有効期間

包装の使用期限欄を参照のこと。
有効期間：製造後3年6か月〔自己認証（自社データ）による〕

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売（お問い合わせ先）
ニプロ株式会社
フリーダイヤル：0120-226-410
受付時間：9:00～17:15（土・日・祝日を除く）

製造

Ever Global (vietnam) ENT. CORP.
ベトナム
[Vietnam]



ニプロ株式会社