

機械器具 11 放射線障害防護用器具
一般医療機器 放射線防護用手袋 38364000

GAMME X[®] ラテックスフリー RAグローブ

再使用禁止

【禁忌・禁止】

1. 使用方法
1) 再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

1. 形状・構造

本品は、術者や他の要員の手の全体を診断及び治療措置に関連した一次放射線や散乱放射線による不必要な被曝から保護するために使用する個人用の非天然ゴム製のタングステン及びエルビウムを配合する手袋である。

* 2. 材質

主材料	ポリイソブレン、タングステン、エルビウム
-----	----------------------

指先厚さ (mm)	ASTM F2547 医療用放射線遮蔽率(両手平均)			
	X線管電圧			
0.30 mm	60kV	80kV	100kV	120kV
	55.2 %	46.1 %	39.6 %	34.5 %

【使用目的又は効果】

術者や他の要員の手の全体を診断及び治療措置に関連した一次放射線や散乱放射線による不必要な被曝から保護するために使用する個人用の手袋である。

【使用方法等】

1. 使用方法

- 1) 手袋を包装から台紙ごと取り出し、装着して使用します。
- 2) 使用後は感染防止に留意し、安全な方法で廃棄します。

<使用方法等に関連する使用上の注意>

1. 刃物等鋭利な器具に手袋が触れると、破れたり穴が開くことがあるため注意してください。

【使用上の注意】

1. 使用注意（次の患者には慎重に適用すること）

- 1) 製品に含まれる化学物質により、かゆみ、かぶれ、発疹等のアレルギー性症状（IV型・遅延型：主に加硫促進剤等の添加剤の化学物質による）を起こすことがある。このような症状を起こした場合には、直ちに使用を中止し医師に相談すること。

2. 重要な基本的注意

- 1) 手袋に破損、汚損、ピンホール等の異常が認められる場合は使用しないこと。
- 2) 電気メス使用時に、高周波回路が形成されないよう注意すること。[手袋の電氣的絶縁性が損なわれ、火傷するおそれがある。]
- 3) 薬品、溶剤、油脂等を使用する場合は手袋の状態を確認の上使用すること。[膨潤、浸透、劣化のおそれがある。]

3. 不具合・有害事象

- 1) その他の不具合
(1) 破損、汚損、ピンホール等
- 2) その他の有害事象
(1) アレルギー症状

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法

水ぬれに注意し、直射日光、オゾン、紫外線、熱源、高温多湿を避けて保管すること。

2. 有効期間

包装の使用期限欄を参照のこと。
有効期間：滅菌後3年 [自己認証(自社データ)による]

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売(お問い合わせ先)

ニプロ株式会社

フリーダイヤル：0120-226-410

受付番号：9:00～17:15（土・日・祝日を除く）

製造

イネオテック社

[Ineo Tech Sdn. Bhd.]

マレーシア

[Malaysia]

GAMME X[®]はAnsell Ltd. の登録商標です。



ニプロ株式会社