

機械器具 51 医療用嘴管及び体液誘導管
管理医療機器 唾液吸引チューブ 70252000

NOHCS®排唾管


再使用禁止

【禁忌・禁止】

1. 使用方法
1) 再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

1. 形状・構造

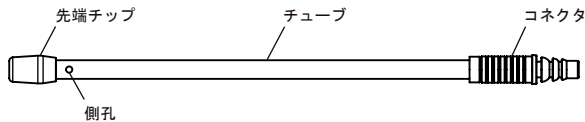

2. 材質

先端チップ	スチレン系熱可塑性エラストマー
チューブ	ポリ塩化ビニル
コネクタ	アクリロニトリル・ブタジエン・スチレン共重合体

ポリ塩化ビニルの可塑剤はフタル酸ジ-2-エチルヘキシルである。

【使用目的又は効果】

吸引器及び回収容器と接続し、口腔内から唾液等を吸引するために用いる。

【使用方法等】

1. 包装を開封し、本品を取り出します。
2. 吸引器の吸引圧を調節します。
3. コネクタと吸引器を吸引チューブでしっかりと接続します。
4. 先端チップを口腔内へ挿入し、余分な唾液や残渣等を吸引します。
5. 使用後は感染防止に留意し、安全な方法で廃棄します。

＜使用方法等に関連する使用上の注意＞

1. 使用前に機器の不具合がないことを確認してください。
2. 吸引器とコネクタが確実に接続されていることを確認してから使用してください。
3. 接続部への薬液等の付着に注意してください。〔緩み等のおそれがあります。〕
4. 誤って気管支等に挿入しないよう注意してください。
5. 過度な締め付けをしないよう注意してください。〔破損のおそれがあります。〕
6. 引っ張り、曲げ、圧縮等に注意してください。〔変形、破損のおそれがあります。〕
7. 歯及び鋭利な器具等で製品を傷つけないよう注意してください。〔破損のおそれがあります。〕
8. 吸引時間に注意して使用してください。
9. 吸引が不十分の場合は医師の判断のもと適宜調整してください。
10. -90kPaを超えない吸引圧で使用してください。〔口腔内の粘膜損傷、変形、破損のおそれがあります。〕

【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意

- 1) 脂溶性の医薬品では、ポリ塩化ビニルの可塑剤であるフタル酸ジ-2-エチルヘキシルが溶出するおそれがある。
- 2) 本品は合成樹脂を用いた製品のため、温度が低下するにつれて強度が低下することから取扱いには注意すること。〔破損のおそれがある。〕

2. 不具合・有害事象

- 1) その他の不具合
(1) 変形
(2) 破損
(3) 緩み、外れ
- 2) その他の有害事象
(1) 粘膜損傷による出血

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法

水ぬれに注意し、直射日光、高温多湿を避けて保管すること。

2. 有効期間

包装に記載の使用期限欄を参照のこと。
有効期間：製造後3年（自己認証による）

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売（お問い合わせ先）
ニプロ株式会社
フリーダイヤル：0120-226-410
受付時間：9:00～17:15（土・日・祝日を除く）

製造

ニプロ（上海）有限公司
[NIPRO (SHANGHAI) CORPORATION LIMITED]
中華人民共和国
[People's Republic of China]



ニプロ株式会社