

機械器具 51 医療用嘴管及び体液誘導管
管理医療機器 唾液吸引チューブ 70252000

ニプロ唾液吸引チューブ

再使用禁止

【禁忌・禁止】


1. 使用方法

1) 再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

1. 形状・構造

本品は内視鏡用マウスピース及び吸引器に接続して使用する。

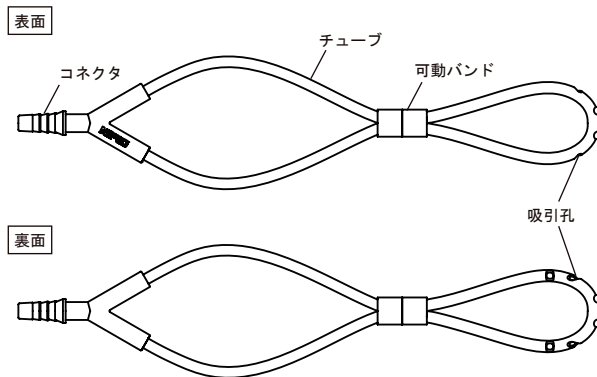

<対応可能サイズ>

内視鏡用マウスピース：開口部 22mm × 27mm以下

吸引器：接続部 φ6.3mm ～ φ9.7mm

2. 材質

本品	ポリ塩化ビニル
----	---------

ポリ塩化ビニルの可塑剤はフタル酸ジ-2-エチルヘキシルである。

【使用目的又は効果】

吸引器及び回収容器と接続し、口腔内から唾液等を吸引するために用いる。

【使用方法等】

1. 包装を開封し、本品を取り出します。
2. 本品の裏面を口腔側に向けます。可動バンドをスライドし、内視鏡用マウスピースの患者口腔内側にはめ込み固定します。
3. 患者の口腔内にチューブ先端部を挿入した後、内視鏡用マウスピースを咥えさせます。
4. コネクタを吸引器に接続します。
5. 吸引器の吸引圧を-10kPaに調節し、吸引を開始します。
6. 使用後は感染防止に留意し、安全な方法で廃棄します。

<使用方法等に関連する使用上の注意>

1. 使用前に機器の不具合がないことを確認してください。
2. 吸引器とコネクタが確実に接続されていることを確認してから使用してください。
3. 接続部への薬液等の付着に注意してください。〔緩み等のおそれがあります。〕
4. 可動バンドの調整時は外れないよう注意し、必ず使用者の手で移動させ、過度な締め付け、緩みなく装着してください。〔破損、外れのおそれがあります。〕
5. 本品の先端部の長さは患者に合わせて調整し、患者の容態を確認しながら挿入、抜去してください。〔無理な挿入、抜去による粘膜損傷のおそれがあります。〕

6. 内視鏡用マウスピースを患者に咥えさせる際、本品が噛まれないよう配置してください。〔破損のおそれがあります。〕
7. 吸引器の接続時に過度な締め付けをしないよう注意してください。〔破損のおそれがあります。〕
8. 引っ張り、曲げ、圧縮等に注意してください。〔変形、破損のおそれがあります。〕
9. 歯及び鋭利な器具等で製品を傷つけないよう注意してください。〔破損のおそれがあります。〕
10. 吸引時間に注意して使用してください。
11. 吸引が不十分の場合は医師の判断のもと適宜調整してください。
12. 吸引中は高粘度の唾液や口腔内異物に注意してください。〔吸引不良のおそれがあります。〕
13. 吸引時間及び吸引圧（最大-40kPa）に注意し、患者の状態を確認しながら使用すること。〔粘膜損傷、低酸素血症のおそれがあります。〕

【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意

- 1) 脂溶性の医薬品では、ポリ塩化ビニルの可塑剤であるフタル酸ジ-2-エチルヘキシルが溶出するおそれがある。

2. 不具合・有害事象

1) その他の不具合

- (1) 変形
- (2) 破損
- (3) 緩み、外れ

2) その他の有害事象

- (1) 粘膜損傷による出血
- (2) 汚染、感染
- (3) 低酸素血症

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法

水ぬれに注意し、直射日光、高温多湿を避けて保管すること。

2. 有効期間

包装に記載の使用期限欄を参照のこと。
有効期間：滅菌後3年（自己認証による）

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売（お問い合わせ先）

ニプロ株式会社

フリーダイヤル：0120-226-410

受付時間：9:00～17:15（土・日・祝日を除く）

製造

ニプロ（上海）有限公司

[NIPRO(SHANGHAI) CORPORATION LIMITED]

中華人民共和国

[People's Republic of China]



ニプロ株式会社