

機械器具 74 医薬品注入器
管理医療機器 単回使用クラスⅡ処置キット 33961002インジェクションセット
(カブリビ用)

再使用禁止

【禁忌・禁止】

1. 使用方法
- 1) 再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

本品は以下の構成部品を組合せたものである。
また、本品は医薬品(外皮用殺菌消毒剤)を組合せている。

構成部品

- ・注射針(セーフティニードル)
- ・調製器具(ツートック)
- ・消毒綿(医薬品: スーパーM・NW70)

【使用目的又は効果】

本品は、製剤を投与する際に必要な医療機器等を利便性向上のために組合せた処置キットである。

【使用方法等】

構成部品の使用方法等は取扱説明書をご確認ください。

1. 本品を開封し、含まれる構成部品を、適切な方法で展開します。
2. 展開した構成部品の種類、数量が内箱に表示されている本品の構成内容と相違ないか確認します。
3. 本品に含まれていない必要な医薬品を準備します。
4. 必要に応じ、製剤の溶解を行い薬液を注射筒に採取します。
5. 必要に応じ、穿刺部位を消毒後、注射針を用いて薬液を投与します。
6. 使用後は感染防止に留意して廃棄用袋に入れます。
詳しい処分方法は、医療機関にお尋ねください。

<使用方法等に関連する使用上の注意>

1. 誤って手指等に針を刺さないよう取扱いには十分注意してください。
2. 接続部に薬液を付着させないでください。[接続後の緩み、液漏れ等のおそれがあります。]
3. 各構成部品の接続が確実にされていることを確認し使用してください。
4. 各構成部品を接続する場合は、過度な締め付けをしないでください。[接続が外れなくなる、接続部の破損、接続部からの液漏れ、空気混入のおそれがあります。]
5. 各構成部品に過度な負荷をかけないよう注意してください。[破損のおそれがあります。]
6. 注射針からプロテクタを外すとき、針先がプロテクタに触れないよう注意してください。[針先変形のおそれがあります。]
7. 薬液の吸引、プライミング後は直ちに使用してください。[薬液の結晶化による針管の詰まり、薬液汚染のおそれがあります。]
8. リキャップしないでください。[リキャップ自体に誤穿刺のおそれがあり、また、誤って斜めにリキャップすることで、針先がプロテクタを貫通するおそれがあります。]
9. 注射針のセーフタッチキャップが正常に針管に被らない場合、又は破損した場合は、誤穿刺に注意し速やかに廃棄してください。
10. 調製器具をバイアルのゴム栓に穿通する際は、ゴム栓中央部に垂直に刺し、横方向に力をかけないよう注意してください。
11. 調製器具をバイアルのゴム栓に穿通後、ゴム栓と密着して固定されていることを確認してください。[液漏れが発生するおそれがあります。]

【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意

- 1) 本品は、清潔な場所で使用すること。
- 2) 本品を使用する際は、使用方法に関して必ず医師の指導を受けてから使用すること。
- 3) 本品は合成樹脂製のため、温度が低下するにつれて強度が低下することから取扱いに注意すること。[破損のおそれがある。]
- 4) 使用中は構成部品の破損、接続部の緩み、空気混入、液漏れ等について、十分注意すること。

2. 不具合・有害事象

1) その他の不具合

- (1) 空気混入 (2) 液漏れ (3) 構成部品の破損

2) その他の有害事象

- (1) 誤穿刺 (2) 穿刺部からの感染

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法

水ぬれに注意し、直射日光、高温多湿を避けて保管すること。

2. 有効期間

包装の使用期限欄を参照のこと。

有効期間: 製造後2年6ヵ月

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元

ニプロ株式会社

フリーダイヤル: 0120-226-069

受付時間: 8:00~16:45 (土・日・祝日を除く)

製造元

ニプロ医工株式会社

販売(お問い合わせ先)

サノフィ株式会社

コールセンター くすり相談室

〒163-1488 東京都新宿区西新宿三丁目20番2号

フリーダイヤル: 0120-109-905 FAX: 03-6301-3010



取扱説明書を必ずご参照ください。



ニプロ株式会社