

歯科材料 09 歯科用研削材料
一般医療機器 歯科用研削器材 70908000
ベレッツァ 4x ミリングバー

****【形状・構造及び原理等】**

[形状・構造]		(単位：mm)	
規格	仕様		材質
DCバー φ2mm	作業部形状	ボールエンド	超 硬 合 金
	作業部径	φ2	
	軸径	φ6	
	全長	55	
	作業部長さ	20	
	コーティング	ダイヤモンド	
DCバー φ1mm	作業部形状	ボールエンド	
	作業部径	φ1	
	軸径	φ6	
	全長	55	
	作業部長さ	16	
	コーティング	ダイヤモンド	
TiSiバー φ0.6mm	作業部形状	ボールエンド	
	作業部径	φ0.6	
	軸径	φ6	
	全長	56	
	作業部長さ	5	
	コーティング	WXLコート	

原理：専用の加工機に取り付けて切削加工を行う。

【使用目的又は効果】

補綴物等の研磨に用いる器材をいう。別に名称を定めるものを除く。
専用の加工機に取り付けて、歯科材料の研削加工に用いる。

【使用方法等】

本品は、歯科技工用CAD/CAM装置に装着して使用する研削器材です。
[組合せて使用する医療機器]
販売名：ベレッツァ 4x ミリングマシン
届出番号：26B1X10008000044

[使用方法]
1) ベレッツァ 4x ミリングマシンの取扱説明書に従い、本品をベレッツァ 4x ミリングマシンに取り付けます。
2) ベレッツァ 4x ミリングマシンに加工データを転送して切削加工を行います。
[使用方法に関連する使用上の注意]
1) 本品をベレッツァ 4x ミリングマシンに確実にセットし、振れがないことを確認すること。
2) 使用前・使用後に変形や破損等がないかを確認すること。

【使用上の注意】

1) 使用注意
①本品は、ベレッツァ 4x ミリングマシン以外の加工機には使用しないこと。
②損傷、変形（錆、表面キズ、曲がり、汚染）などのあるものは、使用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

[保管方法]
・水分、腐食性薬剤及びその蒸気の暴露を避けて、外圧（物理的負荷）及び汚染を受けないように保管すること。
・本品は、歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

***【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】**

製造販売元：株式会社ニッシン
住所：〒621-0001
：京都府亀岡市旭町樋ノ口88
ホームページ：www.nissin-dental.jp
販売元：株式会社アイキャスト
電話番号：0120-228582（フリーダイヤル）
電話受付時間 月～金（祝日を除く）
午前10:00～12:00 午後1:00～5:00