

歯科材料 09 歯科用研削材料
一般医療機器 歯科用研削器材 70908000

ベレッツァ 5x ミリングバー

【形状・構造及び原理等】

[形状・構造]

(単位：mm)

種類	作業部径	コーティングの種類
ジルコニア用	φ0.3	コーティングなし
	φ0.6	DLC
	φ1	DLC
	φ2	ダイヤモンド
メタル用	φ0.6	TiSiN
	φ1	TiSiN
	φ1.5	TiSiN
	*φ1.5*L5	TiSiN
	φ1.5*L6	TiSiN
	φ2	TiSiN
	φ3	TiSiN
インプラントバー用	φ1.5 Drill	TiSiN
	*φ1.5*L7	TiSiN
	*φ1.5*L14	TiSiN
	φ1.75	TiSiN
	φ2*L6	TiSiN
	φ2*L18	TiSiN
	*φ2.0 Drill	TiSiN
セラミック用	φ0.6	ダイヤモンド電着
	φ1	ダイヤモンド電着
	φ1.5	ダイヤモンド電着
	φ2	ダイヤモンド電着
	φ2.5	ダイヤモンド電着

原理：専用の加工機に取り付けて切削加工を行う

【使用目的又は効果】

専用の加工機に取り付けて、歯科材料の研削に用いる。

【使用方法等】

[組合せて使用する医療機器]
販売名：ベレッツァ 5x ミリングマシン
届出番号：26B1X10008000045

- [使用方法]
- ①ベレッツァ 5x ミリングマシンの取扱説明書に従い、本品をベレッツァ 5x ミリングマシンに取り付ける。
- ②ベレッツァ 5x ミリングマシンに加工データを転送して切削加工を行います。

[使用方法に関連する使用上の注意]

- ①本品をベレッツァ 5x ミリングマシンに確実にセットし、振れがないことを確認すること。

【使用上の注意】

- 1) 使用注意
- ①本品はベレッツァ 5x ミリングマシン以外の加工機には使用しないこと。
- ②損傷、変形（錆、表面キズ、曲がり、汚染）などのあるものは、使用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

- [保管方法]
- ・水分、腐食性薬剤及びその蒸気の暴露を避けて、外圧（物理的負荷）及び汚染を受けないように保管すること。
- ・本品は、歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元：株式会社ニッシン
住所：〒621-0001
：京都府亀岡市旭町樋ノ口88
ホームページ：www.nissin-dental.jp
製造元：アルム デンティストリー カンパニーリミテッド
ARUM DENTISTRY Co., Ltd.
国名：韓国
販売元：株式会社アイキャスト
電話番号：0120-228582（フリーダイヤル）
電話受付時間 月～金（祝日を除く）
午前10:00～12:00 午後1:00～5:00