

機械器具21 内蔵機能検査用器具
一般医療機器 歯科用口腔内カメラ 70179000

レディーカム

【禁忌・禁止】

- 視力障害を負う恐れがあるため、
- ・点灯中のライトを覗かないこと。
 - ・他者の目に向けてライトの光を照射しないこと。

【形状・構造及び原理等】

1) 構成



①本体（LED ライト）

- a：カメラ本体、b：1.7x ルーペ、c：ルーペホルダ、
d：専用バッテリー、e：バッテリー充電ホルダー、f：充電アダプタ
g：MicroSD カード、h：MicroSD カードリーダー、i：ビデオケーブル
j：USB ケーブル、k：ユーザーガイド（取扱説明書）

2) 原理

カメラで撮影した口腔内の情報をモニターに映し出す。

3) 電氣的定格

バッテリー

- ・電池種類：リチウムポリマー電池
- ・電池容量：DC3.7V 2600mAh

AC アダプター

- ・入力電圧：AC100～240V
- ・出力電圧：DC5V

【使用目的又は効果】

口腔内の情報をモニターに映し出し、診療、患者への説明等に使用する。

【使用方法等】

本品の詳細な操作方法及び使用法は、付属のユーザーガイドを必ず読むこと

【使用方法】

- ①付属のソフトウェアをインストールする。
- ②付属のマイクロSDカードをカメラ本体に挿入する。

- ③バッテリーを電池ボックスに挿入する。
- ④照明スイッチを入れ、ライトを点灯させる。
- ⑤録画ボタンを押し、録画を行う。
- ⑥録画ボタンを再度押し、録画を停止する。
- ⑦マイクロSDカードを本体から抜いて、カードリーダーに差し込みパソコンモニターに映し出す。

【使用方法に関連する使用上の注意】

- ①充電を行う際は、必ず付属の充電器を使用すること。

【使用上の注意】

1) 使用注意

- ①本品は精密機器のため取扱いに注意すること。
- ②本品は防水構造ではないので濡れた手での操作、水洗、浸水、薬液浸漬は行わないこと。
- ③本品を改造・分解しないこと。
- ④本品が破損したり、何らかの異常を感知した場合は、直ちに使用を中止すること。
- ⑤専用バッテリー、充電器等付属品は本品以外に使用しないこと。
- ⑥ユーザーガイドをよく読んでから使用すること。

【保管方法及び有効期間等】

1) 保管方法

- ①水のかからない場所に保管すること。
- ②高温、多湿の場所に保管しないこと。

2) 耐用期間

製造出荷後、正規の保守点検を行った場合に限り2年間。
記載の耐用期間は自己認証（当社データ）による。

【保守・点検に係る事項】

1) 日常の清掃

- ①清掃は、柔らかく清潔で乾いた布でふくこと。
- ②シンナー、ベンジンなどの有機溶剤は使用しないこと。
- ③蒸気滅菌器、化学滅菌器は使用しないこと。
- ④グルタラル製剤などの消毒・滅菌方法は使用しないこと。

*【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元：株式会社ニッシン

住所：〒621-0001

京都府亀岡市旭町樋ノ口 88

電話番号：0120-571939（フリーダイヤル）

電話受付時間 月～金（祝日を除く）
午前 10：00～午後 5：00

製造元：株式会社セハヌルバイオテック
Saehanul Biotech Co., Ltd.

国名：韓国

販売元：株式会社アイキャスト

電話番号：0120-228582（フリーダイヤル）

電話受付時間 月～金（祝日を除く）

午前 10：00～12：00 午後 1：00～5：00