

F ポル

【形状・構造及び原理等】

〔形状・構造〕


1) 作業部：合成ゴム等、ホワイトアランダム（WA）を含有。



形状：A型



13S型

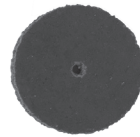

ホイール型

2) 軸部：ステンレス鋼（A型、13S型）

軸部形式2：HP用

〔原理〕

ゴム基材に含有されたホワイトアランダムにより被研磨物を研磨する。

【使用目的又は効果】

ゴム基材で結合された様々な研磨成分から成る歯科用研磨器材で中研磨に用いる。

【使用方法等】

歯科用電気エンジン又はハンドピース等に装着し、回転させ断続的に被研磨物に押し付け研磨します。

形状	最高許容回転数
A型	15,000rpm
13S型	30,000rpm
ホイール型	15,000rpm

〔使用方法に関連する使用上の注意〕

- 1) 本品は、口腔内で使用しないこと。
- 2) ハンドピースメーカーの指示に従い、シャンクを確実に奥まで挿入し、半チャックでないことを確認すること。
- 3) 使用前に予備回転を行い、振れがないことを確認すること。
- 4) 作業に入る前に必ず安全な方向に向けて空回転させドレサーしてから使用すること。
- 5) 本品の作業部は、細い、長い、大きい形状の物は折れたり、曲がったりすることがあるので、無理な角度、過度の加圧では使用しないこと。

【使用上の注意】

- ①指定（製品の被包に記載）の最高許容回転数を超過して使用しないこと。
- ②破損、変形（錆、表面のキズ、曲がり、汚染）等のあるものは使用しないこと。
- ③本品を使用する際には、目の損傷を防ぐため、保護メガネ等を着用すること。
万一目に入った場合には、直ちに大量の流水で洗浄した後、専門医の診断をうけること。
- ④本品を使用する際には、局所吸塵装置、公的機関が許可した防塵マスク等を使用すること。

【保管方法及び有効期間等】

〔保管方法〕

- ・本品は、高温、多湿、直射日光、油脂等を避け暗所にて保管すること。
- ・水分、腐食性薬材及びその蒸気の暴露を避け、外圧（物理的負荷）及び汚染を受けないように保管すること。
- ・本品は、歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

*【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元：株式会社ニッシン

住所：〒621-0001

京都府亀岡市旭町樋ノ口88

ホームページ：www.nissin-dental.jp

販売元：株式会社アイキャスト

電話番号：0120-228582（フリーダイヤル）

電話受付時間 月～金（祝日を除く）

午前 10：00～12：00 午後 1：00～5：00