

## MEDIT T-Series スキャナ

### 【禁忌・禁止】

本品を、歯科修復物の設計以外の用途で使用しないでください。

### 【形状・構造及び原理等】

#### 1) 形状・構造

##### ① T 7 1 0

寸法：幅505mm×奥行271mm×高さ340mm  
重量：約15kg



##### ② T 5 1 0

寸法：幅505mm×奥行271mm×高さ340mm  
重量：約15kg



##### ③ T 3 1 0

寸法：幅505mm×奥行271mm×高さ340mm  
重量：約15kg



#### 2) 電気的定格

定格電圧：AC 100～240V  
周波数：50Hz / 60Hz

#### 3) 構成

スキャナ一式

#### 4) 原理

スキャナ本体にセットした歯科模型等にLEDを照射してスキャンし、測定対象物の形状を三次元データ化します。この三次元データをパソコンに転送し、専用ソフトウェアで歯科修復物等の設計を行います。

#### 5) 性能

##### ① T 7 1 0

測定精度：4  $\mu$ m  
測定範囲：100×73×60mm

##### ② T 5 1 0

測定精度：7  $\mu$ m  
測定範囲：100×73×60mm

##### ③ T 3 1 0

測定精度：9  $\mu$ m  
測定範囲：100×73×60mm

### 【使用目的又は効果】

本品は、複合ソフトウェアを利用した装置で、技工所又は技工室内に設置して歯科修復物のコンピュータ支援設計（CAD）に用いる。

### 【使用方法等】

詳細については、取扱説明書等を必ず参照してください。

#### 1) 設置及び使用準備

- ①取扱説明書に従って適切な場所に設置します。
- ②インストールUSBをパソコンにセットし、ソフトウェアをインストールします。
- ③スキャナ本体とパソコンを付属のUSBケーブルとパワーケーブルを使用して接続します。

#### 2) 操作方法

- ①スキャナ本体及びパソコンの電源を入れます。
- ②ソフトウェアを立ち上げます。
- ③スキャナ本体に歯科模型等をセットします。（必要に応じて付属の治具を使用します。）
- ④スキャニングを開始します。
- ⑤使用後は、ソフトウェアを終了し、パソコン及びスキャナ本体の電源を切ります。

### 【使用方法に関連する使用上の注意】

- ①スキャナにスプレーしないこと。
- ②スキャナの内側のレンズに触れないこと。
- ③本品は、温度-5～45℃、湿度20～80%の環境で使用すること。

### 【使用上の注意】

詳細については取扱説明書を必ず参照してください。

### 【保管方法及び有効期間等】

#### 1) 保管方法

- ①水のかからない場所に保管すること。
- ②気圧、温度、湿度、風通し、日光、ほこり、塩分、イオウ分を含んだ空気などにより悪影響が生ずるおそれのない場所に保管すること。（温度-5～45℃、湿度20～80%）
- ③傾斜、振動、衝撃（運搬時を含む）などに対応する安定状態に注意すること。
- ④化学薬品の保管場所やガスの発生する場所に保管しないこと。

#### 2) 耐用期間

記載の耐用期間は自己認証（当社データ）による。  
製造出荷後、正規の保守点検を行った場合に限り4年間。  
ただし、耐用期間は使用状況により差異を生じることがあります。

### 【保守・点検に係る事項】

詳細については取扱説明書を必ず参照してください。

- 1) 日常点検は取扱説明書に従って行うこと。
- 2) 医療機器の使用保守の管理責任は使用者（病院、診療所、医療機関）側にある。
- 3) 保守点検は使用者側で行うのが原則であるが、行われない場合には、医療機器修理業等の有資格者に外部委託してもよいことが認められている。

### \*【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元：株式会社ニッシン  
住所：〒621-0001  
京都府亀岡市旭町樋ノ口88  
ホームページ：www.nissin-dental.jp  
製造元：メディット コーポレーション  
Medit Corporation  
国名：韓国  
販売元：株式会社アイキャスト  
電話番号：0120-228582（フリーダイヤル）  
電話受付時間 月～金（祝日を除く）  
午前10:00～12:00 午後1:00～5:00