

歯科材料07 歯科用ワックス
一般医療機器 歯科用キャスティングワックス 16189000

ベゴ サービカルワックス

【形状・構造及び原理等】

組成：パラフィンワックス、マイクロリスタリン、
カルナバ、他
形状：常温で固形
原理：加熱により軟化・融解する。

項目	仕様
融点	59℃
灰分	0.015%
フロー	77%

【使用目的又は効果】

ロストワックス法による固定式補綴修復物のろう型作製を行う。

【使用方法等】

- 1）加熱されたインスツルメントを使用し、適度に溶解させたところで支台歯模型のマージン部に盛り上げていきます。
- 2）上記作業を繰り返し、クラウン及びインレーのマージン部形状を作製します。
- 3）彫刻刀などを使用して補綴物外形を完成させます。
- 4）ワックスパターンの埋没、焼成、鑄造は通法に従い作業してください。

【使用上の注意】

- 1）使用注意
 - ①本品は、可燃性のため使用の際に火傷に注意すること。
 - ②本品を使用する場所には、消火器具を備えること。

【保管方法及び有効期間等】

[保管方法]

- ・本品を高温となる場所（ストーブの側、直射日光の当たる場所など）には放置しないこと。
- ・使用及び保管場所には、消火器具を備えること。
- ・本品は、火気厳禁の場所に保管し、一つの保管庫に大量に保管しないこと。
- ・本品は、歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

**【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元：株式会社ニッシン（選任製造販売業者）
住所：〒621-0001
：京都府亀岡市旭町樋ノ口88
ホームページ：www.nissin-dental.jp
製造元：ベゴ プレーマ ゴールドシュレーゲライ
ウイルヘルム ヘルプスト ゲ エム ベ
ハ ウンド コ カゲ
BEGO Bremer Goldschlägerei Wilh.Herbst GmbH &
Co.KG
国名：ドイツ
販売元：株式会社アイキャスト
電話番号：0120-228582（フリーダイヤル）
電話受付時間 月～金（祝日を除く）
午前10：00～12：00 午後1：00～5：00