

歯科材料07 歯科用ワックス
一般医療機器 歯科用キャストイングワックス 16189000
ベゴ ディッピングワックス

【形状・構造及び原理等】

組成：パラフィンワックス、マイクロリスタリン、他
形状：常温で固形
原理：加熱により軟化・溶解する。

項目	仕様
融点	70～75℃
灰分	0.02%

【使用目的又は効果】

支台歯等にワックスコーティングを行いコーピング等を作製する。

【使用方法等】

- 1）本品をワックスポット等で70～75℃に加熱し、溶解します。
- 2）支台歯模型を35℃に温め、ディッピングします。
- 3）硬化後、彫刻刀などを使用してマージン部を完成させます。
- 4）ワックスアップは通法に従い作業してください。

【使用上の注意】

- 1）使用注意
 - ①本品は、可燃性のため使用の際に火傷に注意すること。
 - ②本品を使用する場所には、消火器具を備えること。

【保管方法及び有効期間等】

〔保管方法〕

- ・本品を高温となる場所（ストーブの側、直射日光の当たる場所など）には放置しないこと。
- ・使用及び保管場所には、消火器具を備えること。
- ・本品は、火気厳禁の場所に保管し、一つの保管庫に大量に保管しないこと。
- ・本品は、歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

****【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】**

製造販売元：株式会社ニッシン（選任製造販売業者）
住所：〒621-0001
：京都府亀岡市旭町樋ノ口88
ホームページ：www.nissin-dental.jp
製造元：ベゴ プレーマ ゴールドシュレーゲライ
ウイルヘルム ヘルプスト ゲ エム ベ
ハ ウンド コ カゲ
BEGO Bremer Goldschlägerei Wilh.Herbst GmbH &
Co.KG
国名：ドイツ
販売元：株式会社アイキャスト
電話番号：0120-228582（フリーダイヤル）
電話受付時間 月～金（祝日を除く）
午前10：00～12：00 午後1：00～5：00