

歯科材料 09 歯科用研削材料


一般医療機器 歯科技工用アブレイブ研削器具 70901000

ベゴ ハイグレイズ シリコンポリッシャー

【形状・構造及び原理等】

組成：炭化けい素、ダイヤモンド粒子

形状：

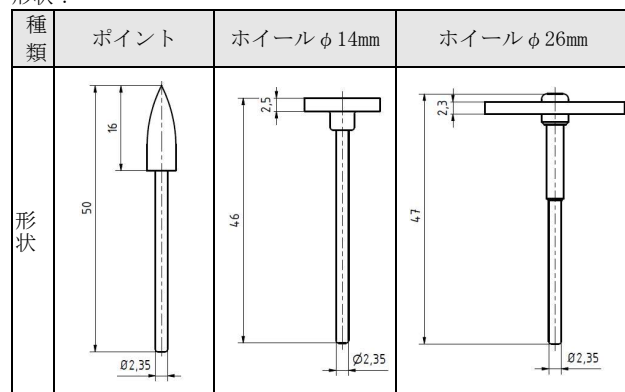

(単位：mm)

種類	ポイント	ホイールφ14mm	ホイールφ26mm
作業部径	5.5	14	26
軸径	φ2.35	φ2.35	φ2.35
全長	50	46	47
作業部長さ	16	2.5	2.3

種類	回転数
ポイント	6,000～15,000rpm
ホイールφ14mm	6,000～10,000rpm
ホイールφ26mm	6,000～10,000rpm

種類	作業部色調	用途
ポイント	グリーン	粗研磨（形態修正）
ホイールφ14mm	ブルー	中研磨
ホイールφ26mm	イエロー	仕上げ研磨

原理：歯科技工用ハンドピース等に取り付けて研磨を行う。

【使用目的又は効果】

炭化けい素、アルミナ等を用いる技工用研削材をいう。ポイント、ホイール、ディスク等を含む。

ジルコニア、セラミックの修正及び研磨仕上げに使用する。

【使用方法等】

歯科技工用ハンドピース等に取り付けて使用します。

*【使用上の注意】

1) 使用注意

- ①本品を使用する際には、目の損傷を防ぐために、保護メガネ等を使用すること。
- ②本品を使用する際には、粉塵による人体への影響を避けるため、局所吸塵装置、公的機関が許可した防塵マスク等を使用し、粉塵を吸引しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

- ・水分、腐食性薬材及びその蒸気の暴露を避けて、外圧（物理的負荷）及び汚染を受けないように保管すること。
- ・直射日光を避け、室温で保管すること。
- ・本品は、歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

**【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

* 製造販売元：株式会社ニッシン（選任製造販売業者）

住所：〒621-0001

：京都府亀岡市旭町樋ノ口 88

電話番号：0120-571939（フリーダイヤル）

電話受付時間 月～金（祝日を除く）

午前 10：00～午後 5：00

製造元：ベゴ プレーマ ゴールドシュレーグライ

ウィルヘルム ヘルプスト ゲ エム ベ

ハ ウンド コ カゲ

BEGO Bremer Goldschlägerei Wilh. Herbst GmbH & Co. KG

国名：ドイツ

販売元：株式会社アイキャスト

電話番号：0120-228582（フリーダイヤル）

電話受付時間 月～金（祝日を除く）

午前 10：00～12：00 午後 1：00～5：00