

機械器具 12 理学診療用器具
高度管理医療機器 白内障・硝子体手術装置(70652000)
白内障・硝子体手術用カセットパック
(CV-24000 硝子体手術用基本セット(18214-7530P))

再使用禁止

【禁忌・禁止】

1.使用方法

- (1)再使用禁止
 - (2)再滅菌禁止
 - (3)包装の破損等により本器具の無菌性が疑わしい場合には、使用しないこと。[滅菌の効果が消失し、感染症を招くおそれがある。]
- 詳細は手術装置付属の添付文書（取扱説明書）及び本器具付属の「CV-24000 ディスポーザブルカセットパック取扱説明」（硝子体手術用基本セット）を参照のこと。

【形状・構造及び原理等】

1.構成


カセット、トレイカバー、取扱説明書(本添付文書を含む)

2.体に接触する部分の組成

接続口、オスルアー : ABS 樹脂
シリコーンゴムチューブ : シリコーン樹脂
灌流チューブ、吸引チューブ : ポリ塩化ビニル※1
※1…可塑剤にフタル酸ジオクチル及びエポキシ化ダイズ油を使用しています。

3.寸法

製品名：硝子体手術用基本セット（18214-7530P）

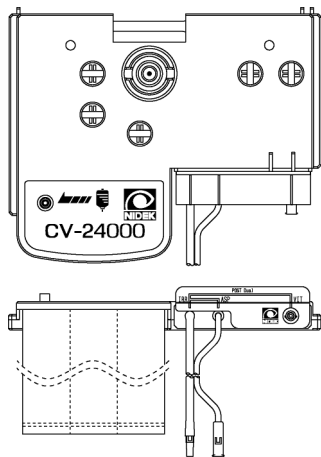

カセット寸法 : 200mm(W)×130mm(D)×20mm(H)
チューブ寸法 : 2000mm(L)

【使用目的又は効果】

超音波白内障・硝子体手術装置に接続して吸引路と灌流路を司るカセット式チューブセット及びそれらの関連器具です。装置 CV-24000 用と CV-30000 用の 2 タイプがあります。尚、装置 CV-24000 用には接続セット 3 種類があり、それらを接続することで、使用可能な範囲が変わります。具体的には下記の通りです。
使用目的: CV-24000 ディスポーザブルカセットパックと硝子体デュアル接続セットを接続したものですぐに硝子体手術に使用することができる。

【使用方法等】

(株)ニデック製 白内障・硝子体手術装置(CV-24000)の Pタイプでは CUSTOM 設定で灌流吸引ラインの接続方法を 2 通り選択できます。以下は P/D Cassette Dual 設定の場合の説明です。

1. 使用前に滅菌袋に破損等がないか、また使用期限内のものか確認します。
2. パック包装を開き、滅菌済みの内容物を無菌的に取り出し、安定した場所に広げます。
3. 清潔操作者により、手術装置のトレイにトレイカバーを被せます。トレイ側面にあるハンガーを引き出し、トレイカバーを上から押さえて袋状にし、チューブ類の収納場所を作ります。
4. 手術装置の電源を投入します。
5. 手術装置にカセットを挿入し、(カセットテストが自動的に始まります)カセットテストが終了するのを待ちます。
6. 灌流経路は灌流カニューラ等を介して硝子体腔に灌流を供給します。吸引経路はバックフラッシュニードル等の吸引ハンドピースに接続します。白い硝子体デュアル接続セットの吸引接続口には硝子体カッターの吸引チューブを接続します。
7. カセットとは別包装のニプロ(株)製 ニデック輸液チューブを無菌的に取り出し、クランプ(クレンメ)を閉じ、点滴筒側を灌流ビンに取り付け、反対側をカセットの上面接続ポートに取り付けます。点滴筒をしごき、点滴筒側面の線まで灌流液を流し込みます。
8. 灌流ボールを手動で延長する場合には、エクステンションチューブ(別売)を継ぎ足し、カセットー灌流ビン間の灌流ラインを延長します。
9. ニプロ(株)製 ニデック輸液チューブのクランプ(クレンメ)を開放します。
10. 手術装置のテストモード(システムテスト)を選択することにより、通水、灌流/吸引のチェックが自動的に行われます。
11. システムテストが終了するのを待ちます。
12. 手術を実施します。

詳細は手術装置付属の添付文書（取扱説明書）を参照のこと。

【組み合わせて使用する医療機器】

- ・本品は組み合わせて使用する機器があるので、詳細は(株)ニデック製白内障・硝子体手術装置の取扱説明書等を参照すること。

【使用方法に関連する使用上の注意】

- ・滅菌有効期限を確認の上、本器具を使用すること。滅菌有効期限は外箱及び個装に記載されている。[自己認証による]
- ・本器具は再使用しないこと。
- ・1 症例 (1 眼) につき 1 セットを使用すること。[自己認証による]

【使用上の注意】

- ・本器具を使用する前に手術装置付属の取扱説明書及び本器具付属の「CV-24000 ディスポーザブルカセットパック取扱説明」（硝子体手術用基本セット）を読み、安全に関する注意事項および使

白内障・硝子体手術用カセットパック
(CV-24000 硝子体手術用基本セット(18214-7530P))
添付文書
18214-P991-K1

取扱説明書を必ずご参照ください。

用方法について十分に理解すること。[範囲外の使用により予期せぬ不具合・有害事象が発生するおそれがある。]

- ・万一の装置の故障に備えて、実施予定の手術のバックアップ手段を講じておくこと。

1.使用注意(次の患者には慎重に適用すること)

- ・手術装置付属の添付文書（取扱説明書）を参照のこと。

2.重要な基本的注意

- ・手術に先立ち、予期される効果と有害事象等について十分に説明すること。
- ・ルアーコネクタをハンドピースに接続する時、まっすぐに挿し込むこと。[斜めに挿し込むとルアーコネクタが削れ、破片が眼内に流入するおそれがある。]
- ・手術装置のカセットテスト及びシステムテストにおいて、カセットの不良が懸念される異常が表示された場合は使用を中止し、新品に交換すること。[手術が思うように行えないばかりか、健康被害が発生するおそれがある。]
- ・手術中、思うように吸引できなかったり、前房が不安定になる等の症状が発生した場合は、1)チューブの接続を確認、2)解消しなければカセット交換の上、再度カセットテスト/システムテストを実施、3)発生状況及びカセットのロット番号を(株)ニデックまで連絡すること。
- ・チューブ部の取り回しには十分注意すること。
- ・接続セット及びルアーなどはしっかりと接続すること。[安定した圧力・流量で制御できなくなるおそれがある。]

3.相互作用(他の医薬品・医療機器等との併用に関すること)

[併用禁忌](併用しないこと)

- ・本器具は(株)ニデック製 白内障・硝子体手術装置と併用して使用するものであり、単体での使用及び他の医療機器との併用はしないこと。[範囲外の使用により予期せぬ不具合・有害事象が発生するおそれがある。]
- ・輸液チューブはニプロ(株)製 ニデック輸液チューブを使用し、エクステンションチューブはニプロ(株)製 ニプロエクステンションチューブ(EX5-180AC または EX5-60DAC)を使用すること。[灌流量が不足し、吸引時に前房が浅くなるおそれがある。]

[併用注意](併用に注意すること)

- ・脂溶性の医薬品ではポリ塩化ビニルの可塑剤であるフタル酸ジオクチル及びエポキシ化ダイズ油が溶出するおそれがあるので注意すること。

4.不具合・有害事象

[その他の不具合]

- (1) 機械の故障
- (2) 異物の付着・混入
- (3) 破損

[重大な有害事象][その他の有害事象]

手術装置付属の添付文書（取扱説明書）を参照のこと。

【保管方法及び有効期間等】

1.貯蔵・保管

- ・水のかからない場所に保管すること。

- ・直射日光が当たらない場所に保管すること。

- ・振動、衝撃が加わらず、清潔で乾燥した場所に荷重の掛からない状態で保管すること。

- ・化学薬品の保管場所や腐食性ガスの発生する場所には保管しないこと。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社 ニデック

電話番号：0533-67-6151(代)

取扱説明書を必ずご参照ください。

白内障・硝子体手術用カセットバック
(CV-24000 硝子体手術用基本セット(18214-7530P))

添付文書

18214-P991-K1