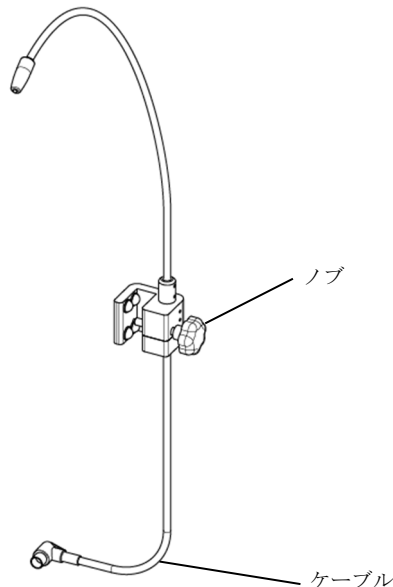


機械器具 22 検眼用器具
管理医療機器 眼撮影装置（16419000）

特定保守管理医療機器 「ゴニオスコープ GS-1」の付属品
外部固視灯

【形状・構造及び原理等】**【保管方法及び有効期間等】**

1. 耐用期間
装置本体の仕様に準ずる。
2. 保管の条件
装置本体の仕様に準ずる。

【保守・点検に係る事項】

1. 保守・点検
装置本体の取扱説明書、または電子化された添付文書を参照すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社ニデック
電話番号：0533-67-6151（代）

【使用目的又は効果】**使用目的**

眼球を観察、撮影又は記録し、電子画像情報を診断のために提供する。

【使用方法等】**1. 環境条件**

装置本体の仕様に準ずる。

2. 使用方法

1. 装置本体の電源を OFF にします。
2. 外部固視灯を装置本体のヘッドレストに取り付け、ノブを締めて固定します。
3. ケーブルを装置本体の固視灯コネクターへ接続します。
4. 装置本体を起動し、パラメーター「外部固視灯」を ON に設定します。
5. 固視が安定しない患者に使用します。
撮影していない眼で外部固視灯を見つめることにより、視線を安定させます。

【使用上の注意】

使用する前に装置本体に付属されている取扱説明書、または電子化された添付文書を参照し、安全に関する注意事項および使用方法について十分に理解すること。

取扱説明書を必ずご参照ください。

「ゴニオスコープ GS-1」の付属品
外部固視灯 電子添文
GN001-P9A1-A0