


機械器具 22 検眼用器具
管理医療機器 眼撮影装置（16419000）
特定保守管理医療機器

「共焦点走査型ダイオードレーザ検眼鏡 Mirante」の付属品
広角アダプタ

【形状・構造及び原理等】

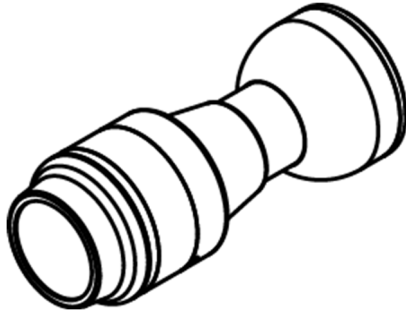

【使用目的又は効果】

1. 使用目的

眼球を観察、撮影又は記録し、電子画像情報を診断のために提供する。

【使用方法等】

1. 環境条件

装置本体の仕様に準ずる。

2. 使用方法

- (1) ジョイスティックで、光学ヘッドを検者側の手前いっぱい
に引きます。
- (2) 広角アダプタのレンズに汚れがないことを確認後、正しい
位置に合わせて対物レンズに装着します。

【使用方法に関連する使用上の注意】

- ・撮影時に被検眼との接触に注意すること。[眼球に傷をつける
恐れがある。]
- ・使用前に広角アダプタのレンズに、傷、ほこり、ごみ、指紋な
どがないことを確認すること。[撮影画像の画質が低下する恐
れがある。]

【使用上の注意】

使用する前に装置に付属されている取扱説明書、または電子化
された添付文書を参照し、安全に関する注意事項および使用方
法について十分に理解すること。

1. 重要な基本的注意

撮影に先立ち、患者に撮影の目的、方法について十分に説明す
ること。[意図した撮影ができない恐れがある。]

【保管方法及び有効期間等】

1. 耐用期間

装置本体の仕様に準ずる。

2. 保管の条件

装置本体の仕様に準ずる。

【保守・点検に係る事項】

1. 保守・点検

装置本体の取扱説明書、または電子化された添付文書を参照す
ること。

2. クリーニング

- ・広角アダプタのレンズに指紋等の汚れが付着している場合は清
掃すること。ただし、広角アダプタのレンズのクリーニングで
は消毒用アルコールは使用しないこと。[わずかな汚れでも撮
影画像の画質に影響する場合がある。]
- ・感染症患者に広角撮影を行った後は、必ず消毒用アルコールを
含ませた綿棒等で清掃すること。ただし、広角アダプタのレン
ズに消毒用アルコールを使用する場合はごく少量とすること。
[二次感染の恐れがある。]

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社ニデック

電話番号：0533-67-6151（代）

取扱説明書を必ずご参照ください。

「共焦点走査型ダイオードレーザ検眼鏡 Mirante」の付属品
広角アダプタ電子添文
SR002-P9H1-A0