

機械器具 22 検眼用器具  
管理医療機器 眼撮影装置（16419000）  
特定保守管理医療機器

「共焦点走査型ダイオードレーザ検眼鏡 M i r a n t e」の付属品  
OCT Viewer for NAVIS-EX

【形状・構造及び原理等】

1. 概要

光干渉断層計（OCT）で撮影した検査データを、NAVIS-EX で表示、解析する。

2. 構成品

OCT Viewer for NAVIS-EX インストールディスク  
OCT Viewer for NAVIS-EX 取扱説明書

- ・ 廃棄、リサイクルに関する自治体の条例、リサイクル計画にしたがって廃棄すること。  
[不適切な廃棄は環境を汚染する恐れがある。]

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社ニデック  
電話番号：0533-67-6151(代)

【使用目的又は効果】

使用目的

眼球を観察、撮影又は記録し、電子画像情報を診断のために提供する。

【使用方法等】

OCT Viewer for NAVIS-EX（以下、OCT Viewer とする）を使用するにあたり、OCT Viewer の取扱説明書、および NAVIS-EX の取扱説明書を熟読し、内容を理解した上で使用すること。

1. 使用方法

(1) 起動・準備

- 1) サーバーPC の電源を入れます。
- 2) クライアント PC の電源を入れます。
- 3) NAVIS-EX を起動します。
- 4) OCT Viewer を起動します。

(2) 操作

OCT Viewer の操作は、眼科医またはその他医師、看護師、臨床検査技師、視能訓練士が行うこと。

- 1) 患者データを選択します。
- 2) 撮影画像を選択します。
- 3) 撮影画像を閲覧・編集します。
- 4) 周辺機器が接続されている場合はレポートを印刷、またはデータを送信します（必要時）。

(3) 終了

- 1) OCT Viewer を終了します。
- 2) NAVIS-EX を終了します。
- 3) PC をシャットダウンします。

【使用上の注意】

使用する前に装置に付属されている取扱説明書、または電子化された添付文書を参照し、安全に関する注意事項および使用方法について十分に理解すること。

重要な基本的注意

- ・ インストールディスクは、OCT Viewer のアンインストール、再インストールを行う際に必要になるので、大切に保管すること。

取扱説明書を必ずご参照ください。

「共焦点走査型ダイオードレーザ検眼鏡 M i r a n t e」の付属品  
OCT Viewer for NAVIS-EX 電子添文  
SR002-P9P1-A0