


機械器具 22 検眼用器具
一般医療機器 レフラクタ（35299000）
「レフラクター RT-600」の付属品
±0.50D クロスシリンダーレンズ

【形状・構造及び原理等】

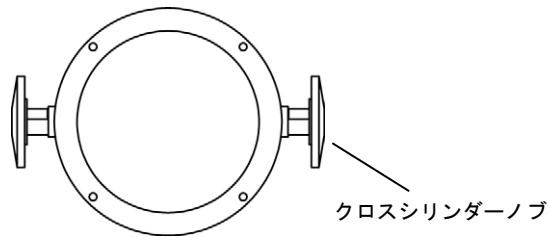

【保守・点検に係る事項】

保守・点検

装置本体の取扱説明書、または電子化された添付文書を参照すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社ニデック

電話番号：0533-67-6151(代)

1. 構成

±0.50D クロスシリンダーレンズ 左右 1 組

2. 作動・動作原理

標準の±0.25D クロスシリンダーレンズと交換して使用する±0.50D クロスシリンダーレンズです。

【使用目的又は効果】

使用目的

眼の屈折状態を測定するため、様々な度数のレンズを内蔵した機器

【使用方法等】

1. 使用方法

(1) 標準のクロスシリンダーレンズと交換する

- (1)-1. クロスシリンダーレンズの止めネジ 2 本を外します。
- (1)-2. 「P」の文字が付いた保持リングを取り外してから、リングの後ろにあるスプリングを取り外します。
- (1)-3. 標準のクロスシリンダーレンズを取り外します。
- (1)-4. 逆手順で、±0.50D クロスシリンダーレンズを取り付けます。

(2) 検眼

標準のクロスシリンダーレンズと同様の手順で検眼を行います。

【使用上の注意】

使用する前に装置本体に付属されている取扱説明書、または電子化された添付文書を参照し、安全に関する注意事項および使用方法について十分に理解すること。

【保管方法及び有効期間等】

1. 耐用期間

装置本体の仕様に準ずる。

2. 保管の条件

装置本体の仕様に準ずる。

取扱説明書を必ずご参照ください。

「レフラクター RT-600」の付属品
±0.50D クロスシリンダーレンズ 電子添文
33863-P9A1-A0