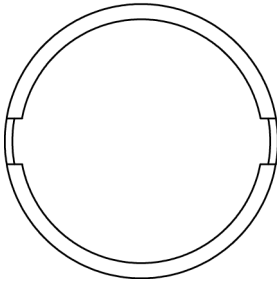


機械器具 22 検眼用器具
一般医療機器 レフラクタ (35299000)
「レフラクター RT-600」の付属品
球面補助レンズ +2.50D (レチノスコープ用)

【形状・構造及び原理等】**1. 構成**

レチノスコープ用レンズ +2.50D 左右 1 組

2. 作動・動作原理

レチノスコープ用レンズ +1.50D（標準）と交換して使用する
+2.50D のレチノスコープ用レンズです。

【使用目的又は効果】**使用目的**

眼の屈折状態を測定するため、様々な度数のレンズを内蔵した
機器

【使用方法等】**1. 使用方法****(1) 標準のレチノスコープ用レンズと交換する**

- (1)-1. 被検者側のカバーガラスとそれを固定しているリング
を外します。
- (1)-2. 補助レンズノブを回し、レチノスコープ用レンズを選
択します。
- (1)-3. 補助レンズノブを両側に少し回すと、レチノスコープ
用レンズの上下にネジとワッシャが見えます。
- (1)-4. これら 2 本のネジを外し、レチノスコープ用レンズを
取り外します。
- (1)-5. 逆手順で、+2.50D のレチノスコープ用レンズを取り付
けます。

(2) 検眼

標準のレチノスコープ用レンズと同様の手順で検眼を行いま
す。

【使用上の注意】

使用する前に装置本体に付属されている取扱説明書、または電
子化された添付文書を参照し、安全に関する注意事項および使
用方法について十分に理解すること。

【保管方法及び有効期間等】**1. 耐用期間**

装置本体の仕様に準ずる。

2. 保管の条件

装置本体の仕様に準ずる。

【保守・点検に係る事項】**保守・点検**

装置本体の取扱説明書、または電子化された添付文書を参照す
ること。

【製造販売者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社ニデック

電話番号：0533-67-6151(代)

取扱説明書を必ずご参照ください。

「レフラクター RT-600」の付属品
球面補助レンズ +2.50D (レチノスコープ用) 電子添文
33863-P9B1-A0