


機械器具 22 検眼用器具
一般医療機器 レフラクタ (35299000)
「レフラクター RT-600」の付属品
球面補助レンズ $\pm 10.00\text{D}$

【形状・構造及び原理等】

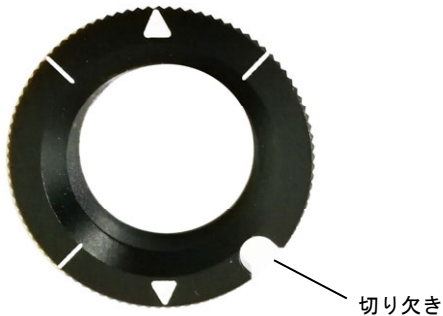

1. 構成

球面補助レンズ $+10.00\text{D}$ 左右 1 組球面補助レンズ -10.00D 左右 1 組

2. 作動・動作原理

球面度数を $+26.75\text{D}$ ～ -29.00D の範囲で測定できるようにする
球面補助レンズです。検眼窓に取り付けて使用します。

【使用目的又は効果】

使用目的


眼の屈折状態を測定するため、様々な度数のレンズを内蔵した
機器

【使用方法等】

1. 使用方法

(1) 検眼窓に取り付ける

切り欠きをセットビスに合わせて、検眼窓に球面補助レンズ
を取り付けます。

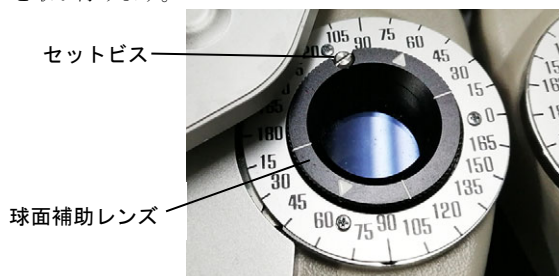

(2) 検眼

検眼を行います。測定された球面度数に、取り付けた球面補
助レンズの値を加算して球面度数測定値とします。

【使用上の注意】

使用する前に装置本体に付属されている取扱説明書、または電
子化された添付文書を参照し、安全に関する注意事項および使
用方法について十分に理解すること。

【保管方法及び有効期間等】

1. 耐用期間

装置本体の仕様に準ずる。

2. 保管の条件

装置本体の仕様に準ずる。

【保守・点検に係る事項】

保守・点検

装置本体の取扱説明書、または電子化された添付文書を参照す
ること。

【製造販売者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者: 株式会社ニデック

電話番号: 0533-67-6151(代)

取扱説明書を必ずご参照ください。