

医療用品（6）視力表及び色盲検査表
一般医療機器 特殊視力検査装置（70973000）
「スペースセイビングチャート SSC-370」の付属品
リモコン

【形状・構造及び原理等】

呈示する視標が A チャート用のものと D チャート用のものがあります。

**1. 構成**

リモコン、電池 2 本、設定ラベル

【使用目的又は効果】**使用目的**

光学的に遠方の視標を呈示する視力検査装置

【使用方法等】**1. 環境条件**

装置本体の仕様に準ずる。

2. 使用方法

基本的な操作は(1)→(2)→(3)→(4)の流れとなります。

(1) リモコンの設定

- (1)-1. リモコンに付属の単 3 形電池 2 本をセットします。
- (1)-2. リモコンの電源を入れます。Set Type 画面が表示されます。
- (1)-3. 視力表の電源を入れた状態にし、数字キー1～8 で、Channel（リモコンチャンネル）を選択します。
- (1)-4. F1 を押し、設定を保存します。
- (1)-5. 設定を確認します。
- (1)-6. 設定ラベルに、手順 5 で確認した設定を記入し、電池ボックス内に貼り付けます。

(2) 準備

- (4)-1. 電源スイッチを ON にします。
- (4)-1. チャート呈示位置を調整します。

(3) 測定

必要な設定を行い、測定を行います。

(4) 終了

- (4)-1. 電源スイッチを OFF にします。

【使用上の注意】

- ・使用する前に装置に付属されている取扱説明書、または電子化された添付文書を参照し、安全に関する注意事項および使用方法について十分に理解すること。

【保管方法及び有効期間等】**1. 環境条件**

装置本体の仕様に準ずる。

2. 貯蔵・保管

- ・水のかからない場所に保管すること。
- ・直射日光や湿度の高い環境を避け、室温にて保管すること。
- ・清潔で乾燥した場所に、荷重の掛からない状態で保管すること。
- ・化学薬品、有機溶剤の保管場所や腐食性ガスの発生する場所には保管しないこと。
- ・空気中に塩分、イオウ分、多量のコロリを含む場所には保管しないこと。
- ・振動、衝撃が加わらず、傾斜のない場所に保管すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元：株式会社ニデック

電話番号：0533-67-6151(代)

取扱説明書を必ずご参照ください。

「スペースセイビングチャート SSC-370」の付属品
リモコン 電子添文
33292-P9B1-A0