


機械器具 22 検眼用器具 レフラクタ（35299000）
一般医療機器 （医療用品 6 視力表及び色盲検査表 特殊視力検査装置（70973000））

「レフラクタ RT-6100」の付属品
フルアシストシステム

【形状・構造及び原理等】

ジョイスティックコントローラー

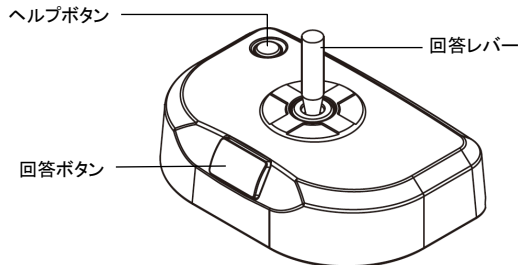

1. 構成

ジョイスティックコントローラー
面ファスナー
インストール CD
取扱説明書
簡易説明シート

2. 体に接触する部分の組成

＜ジョイスティックコントローラー＞
ヘルプボタン、回答ボタン：ABS 樹脂
回答レバー：POM

【使用目的又は効果】

1. 使用目的

眼の屈折状態を測定するために、様々な度数のレンズを内蔵した機器である。また、光学的に遠方及び近方の視標を呈示する視力検査装置と組合せて使用する複合機にもなる。

【使用方法等】

本プログラムを使用するにあたり、本プログラムに付属の取扱説明書を熟読し、内容を理解した上で使用すること。

1. 環境条件

装置本体の仕様に準ずる。

2. 使用方法

(1) 起動

- 1) RT-6100 および SSC-100 を起動します。
- 2) PC の電源を ON にし、Windows を起動します。
- 3) RT-6100 および SSC-100 の起動が完了した後、[Fully Assisted Refraction System] を起動します。

(2) 準備

- 1) 布に消毒用アルコールを含ませ、ジョイスティックコントローラーの各ボタンや回答レバーなど、被検者が触れる可能性がある箇所を拭きます。
- 2) オートレフで測った他覚データまたはレンズメータで測った眼鏡の測定データを入力します。
- 3) 近用測定と音声ガイドの言語を設定します。

(3) 測定

- 1) レフラクタの準備をします。
- 2) START ボタンを押します。
- 3) 音声ガイドに従い、被検者はジョイスティックコントローラーで回答します。
- 4) すべての測定項目が終了したら、測定結果を確認します。

【使用上の注意】

使用する前に装置本体に付属されている取扱説明書、または電子化された添付文書を参照し、安全に関する注意事項および使用方法について十分に理解すること。

【保管方法及び有効期間等】

1. 耐用期間

装置本体の仕様に準ずる。

2. 保管の条件

装置本体の仕様に準ずる。

【保守・点検に係る事項】

1. 保守・点検

装置本体の取扱説明書、または電子化された添付文書を参照すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社ニデック
電話番号：0533-67-6151（代）

取扱説明書を必ずご参照ください。

「レフラクタ RT-6100」の付属品
フルアシストシステム 電子添文
RTP15-P941-A1