

フィニッシュマスター

【警告】

最高許容回転速度（20,000rpm）を超えて使用しないこと。

【形状・構造及び原理等】

1) 形状

外観は著しい変形がなく、均一な色合いを有している。



シリンダータイプ



ホイールタイプ

2) 成分

ラバー、シリコンカーバイド

【使用目的又は効果】

コバルトクロム合金、ニッケルクロム合金の研磨

【使用方法等】

歯科用マンドレルに取り付け、歯科用電気エンジンなどに装着して使用する。

【使用上の注意】

- 1) 歯科用マンドレルに確実に固定すること。
- 2) ハンドピースメーカーの指示に従って、シャンクを確実に奥まで挿入し半チャックでないことを確認する。
- 3) 必ず右回転で使用する。
- 4) 使用前に予備回転を行い、振れがないことを確認すること。
- 5) 無理な角度や過度の加圧での使用はしないこと。
- 6) 変形、損傷(錆、表面キズ、曲がり、汚損)等のあるものは使用しないこと。
- 7) 本材を使用して研削する際には、局所吸塵装置、公的機関が許可した防塵マスク等を使用すること。
- 8) 目の損傷を防ぐために、保護眼鏡等を使用すること。
- 9) 本材は【使用目的又は効果】の項に記載の用途以外には使用しないこと。
- 10) 本材は、歯科医療有資格者以外は使用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

歯科の従事者以外が触れないように適切に保管、管理すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 : 株式会社日本歯科金属
住所 : 〒595-0024
大阪府泉大津市池浦町5-13-30
TEL. : 0725-51-7786
FAX. : 0725-33-8870

輸入先国名 : アメリカ合衆国（製造国名：ドイツ）
輸入先企業名 : AXIS DENTAL CORPORATION