

セレクトライト

* **【形状・構造及び原理等】**

形状	成分	色調
固体成形体 (70g×4) (70g×1)	脂肪酸、動植物油脂、 脂肪酸塩、酸化アルミニウム	白色

原理：レーズやハンドピースに装着したポリッシャーブラシ、フェルト、バフなどを回転させながらその外縁に本材を付着させて研磨を行う。

【使用目的又は効果】

補綴物の研磨、艶出し、仕上げ研磨に使用する。

* **【使用方法等】**

正しく装着されたポリッシャーブラシ、フェルト、バフなどを回転させ本材を付着させたのち、補綴物に当て研磨して下さい。

【使用上の注意】

- 1) 研磨の際に研磨かす等から粉塵が発生するので、それらを吸引しないように密閉されていない換気された場所で使用すること。
これらの微粉やバフの繊維等の粉塵を長期間にわたって吸引すると健康を損なう恐れがあるので、粉塵が拡散しないように対策の取られた場所で使用してください。
- 2) 本材を口腔内で使用しないこと。
- 3) 万一の事故の際、眼の損傷を防ぐために保護メガネなどを使用して下さい。
本材が眼に入った場合、直ちに清浄な流水で15分以上洗眼した後（但し、研磨材砥粒を含有している為、瞼を絶対に擦らないように注意すること）、眼科医の手当てを受けてください。
- 4) この用紙は製品を使いきるまで、いつでも見られる所に保存し、わからない時は再読して下さい。
なお、この用紙を紛失された場合には製造販売業者又は、ご購入された販売業者へお申し付け下さい。
- 5) 本品は、歯科医療有資格者以外は使用しないで下さい。

【保管方法及び有効期間等】

湿気、腐食性薬剤及びその蒸気を避けること。
外圧（物理的負荷）及び汚染を避けること。

* **【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】**

製造販売業者	株式会社日本歯科金属
住所	〒595-0024 大阪府泉大津市池浦町 5-13-30
TEL.	0725-51-7786
FAX.	0725-33-8870
販売 住所	セレクト株式会社 〒543-0011 大阪府大阪市天王寺区清水谷町 19-10
TEL.	06-6765-0691
FAX.	06-6765-0690