

歯科材料 07 歯科用ワックス
一般医療機器 歯科用キャストイングワックス JMDN 16189000

カラーインレックス

【形状・構造及び原理等】

形状：固形缶入り

成分：パラフィン、植物性ワックス
合成ワックス、着色料

*[参考情報]

該当規格：J I S T 6 5 0 3「歯科インレー鑄造用ワックス」

*【製造販売業者又は製造業者等の氏名又は名称等】

製造販売元：日本歯研工業株式会社

住 所：〒141-0031

東京都品川区西五反田 5-1-10

電 話 番 号：03-3492-0927

物理的性質

温度 (°C)	加圧短縮率 (%)	熱膨張率 (%)
	間接法用	
30	1.0 以下	0.2 以下
37	—	0.6 以下
40	50.0 以上	—
45	70.0~90.0	—

*【使用目的又は効果】

使用目的、用途

- ①ワックス盛り上げ法のドロップ・オン・テクニック（ワックス・コーン・テクニック）に使用するワックス
- ②黄色のワックスは、やや硬めで粘りがあり、ファンクショナル及びノンファンクショナルカスプを作るコーン専用にご使用ください。
- ③赤・青・緑色のワックスはフォッサ・マージナルリッジ・ファセット・隆線等にご使用ください。

*【使用方法等】

- (1) 模型材の表面にワックス分離材を塗布します。
- (2) 盛り上げ法の場合には、ワックスインストルメントなどを用いて少量ずつ適温に溶かしたワックスを盛り上げていきます。
- (3) カービング、埋没は通法に従い作業してください。

【使用上の注意】

- (1) 使用注意
 - ①本材は可燃性であるので、使用の際火傷しないよう注意すること。
 - ②本材を高温となる場所（ストーブの側、直射日光の当たる場所など）に放置しないこと。
 - ③使用及び保管場所には、消火装置を備えること。
 - ④本材は、記載の用途以外には使用しないこと。
 - ⑤本材は、歯科医療有資格者以外は使用しないこと。
- (2) 重要な基本的注意
 - ①本材の使用により発疹、皮膚炎などの過敏症状があらわれた患者には、使用を中止し、医師の診断を受けさせること。
 - ②本材又は類似成分の材料に対して発疹、皮膚炎などの過敏症の既往歴のある患者には使用しないこと。

*【保管方法及び有効期限等】

*[保管方法]

- ①本材は火気厳禁の冷暗所に保管し、1つの保管庫に大量に保管しないこと。
- ②歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。