


器64 歯科用探針
一般医療機器 歯周ポケットプローブ（31848000）

コンタクトプローブ

*【形状・構造及び原理等】

1、形状、構造

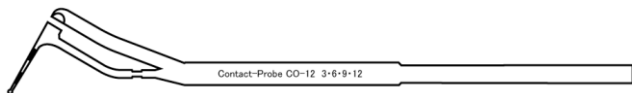

2、原材料：プラスチック

3、機能：コンタクトプローブのコンタクトポイントが接触すると、20gのプロービング圧力となる。

4、原理：作業部位を操作し、歯周ポケットの深さを測定する。

**【使用目的又は効果】

歯周疾患の進行を観察するため、歯周ポケットの深さを測定するために用いる歯科用手用器具をいう。

**【使用方法等】

- ・使用前に必ず洗浄、滅菌して使うこと。
- ・歯周疾患の進行を観察するため、歯周ポケットの深さを測定する。
- ・使用後は適切に洗浄、滅菌を行う。

【使用上の注意】

(1) **注意事項の厳守**：器具の正しい使用のために、注意事項を必ず守ること。

(2) **使用者の限定**：本品は歯科医療有資格者以外は使用しないこと。

(3) **使用前の注意**：使用前に必ず洗浄・滅菌すること。
又、器具の使用前点検を行うこと。
（保守・点検に係る事項を参照すること。）

(4) **目的外使用の禁止**：歯科医療上の使用目的以外で使用しないこと。又、無理な角度、過度の加圧での使用は折れたり、曲ったりすることがあるので避けること。

(5) **二次加工等の禁止**：

- ①破損等の原因となるので、器具に対して曲げ、切削、打刻（刻印）等の二次加工（改造）を絶対行わないこと。
- ②過剰な加熱は、器具の破損の原因となるので行わないこと。

(6) **洗浄、消毒、滅菌上の注意**：

- ①血液、体液、組織片等により汚染した器具は、汚染物質が乾いて固着することを防ぐために、使用後直ちに以下の手順で洗浄、消毒、滅菌を行うこと。
- ②使用後は、精製水を用いて器具に付着した血液、体液、組織片を速やかに除去すること。
- ③薬液消毒として「グルタールアルデヒド2%溶液」等に浸漬する。
薬液消毒を行う時は、薬剤の添付文書に書かれた用法・用量に従って下さい。
- ④加熱滅菌器（オートクレーブ滅菌器など）の決められた条件で使用すること。高温の乾燥は、器具が変質または変色することがある。加重が加わった状態で加熱滅菌（オートクレーブ等）をかけると変形しますので注意して下さい。

**【保管方法及び有効期間等】

**保管方法

- ・本品は歯科医療従事者が適切に保管・管理すること。
- ・本品を保管する場所は、高温・多湿・紫外線を避け、塵やほこりのない清潔な場所に保管すること。
- ・滅菌済のものを貯蔵・保管するにあたっては、再汚染を防ぐため清潔な場所に保管するとともに、滅菌の有効保管期間の管理をすること。
- ・器具の寿命を著しく低下させるので、粗雑な取扱いはしないこと。又、器具の変形の原因となるので、器具の移動及び保管は丁寧に行うこと。

【保守・点検に係る事項】

医療機器の使用、保守管理責任については、一義的に使用者側にあるので、次のことを守ること。

使用前・使用後の点検：使用前・使用後に、作業部、柄部に破損、ヒビ、キズ及び変質等がないか目視及びルーペで確認すること。これらがある場合は、使用を中止すること。

**【製造販売業者及び製造業者等の氏名又は名称等】

製造販売業者名：日本歯研工業株式会社
住 所：〒141-0031
東京都品川区西五反田5-1-10
電話番号：03-3492-0927
ファックス：03-3493-8722
ホームページ：http://www.nipponshiken.com/