

SmarTip ニードルレスカニューラ

再使用禁止

【禁忌・禁止】

<使用方法>

- 1.再使用禁止
- 2.再滅菌禁止

【形状・構造及び原理等】



<原材料>

カニューラ:MBS樹脂
キャップ:ポリプロピレン


【使用目的又は効果】

本品は、バイアル及びアンフルから薬液を採取するために用いる機器である。

【使用方法等】

(1)準備

- 1.プリスターパックを箱から取り出し、プリスターパックを両手で開封して製品の接続箇所を露出する。
- 2.カニューラに注射筒を挿入後しっかりと嵌合させ、キャップからまっすぐにカニューラを引き抜く(下図)。

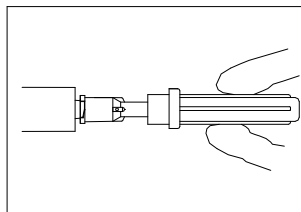

〔注意〕注射筒を回転させながら引き抜かないこと。〔カニューラがキャップ内に残るため。〕

(2)バイアル及びアンフルへのアクセス

- 1.カニューラをバイアルに対し垂直に刺入し、薬剤を吸引する。

〔注意〕バイアルに対し斜め方向からの刺入は避けるとともに、無理に押し込まないこと。もし挿通しにくいときは、慎重に操作すること。〔カニューラ先端部の折れ、曲がりの原因となり正常に薬液が吸引できない恐れがあるため。〕

- 2.アンフル口にカニューラを挿入し、薬剤を吸引する。必要に応じてアンフルにカニューラを根元まで挿入したり、アンフルを傾けると薬剤の吸引がやり易くなる。

〔注意〕液量が少量のアンフルにアクセスするときは、カニューラを無理に挿入しないこと。〔ガラス片発生の原因となるため。〕

【使用上の注意】

1.重要な基本的注意

- カニューラ先端部には、直接手を触れないこと。〔刺入箇所が汚染するおそれがあるため。〕
- 誤刺に注意すること。〔本品の先端部(刺入部)に接触すると受傷するおそれがあるため。〕
- 吸引操作の最中に、カニューラが注射筒から外れないように注意すること。外れを未然に防止するため、カニューラへの接続は、ルアーロック式の注射筒を推奨する。
- 本品にロック機構のある注射筒等を接続する時は、きつく締めすぎないように注意すること。〔本品のネジ山が破損するおそれがあるため。〕
- ボトルおよび輸液ラインのアクセスポートへの接続はしないこと。
- 本品はMR Safeであり、一般的なMR検査による影響はない。

2.不具合・有害事象

操作中に、以下の不具合・有害事象がまれにあらわれることがあるので、異常が認められたら直ちに適切な処置をすること。

重大な不具合

薬液の損失

重大な有害事象

薬液へのガラス片の混入

【保管方法及び有効期間等】

1.保管の条件

室温下で、水濡れに注意し、直射日光及び高温多湿を避けて保管すること。

2.有効期間

包装上に記載(自己認証(当社データ)による)。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者:カーディナルヘルス株式会社
カスタマーサポートセンター:0120-917-205

外国製造業者名:Cardinal Health(カーディナルヘルス)
国名:アメリカ合衆国