

JBP ナノニードル

再使用禁止


【禁忌・禁止】

再使用禁止

**【形状・構造及び原理等】

〔形状及び構造〕

本品は、針管及び針基から構成され、注射筒を用いて注射用医薬品を注入し、又は血液若しくは体液などを採取する単回使用の注射針である。

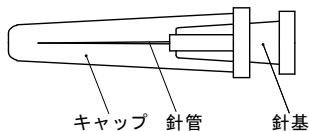

**【原材料】

針管:ステンレス鋼

針基:ポリプロピレン

潤滑剤:シリコーン油

【使用目的又は効果】

注射筒を用いて注射用医薬品を注入し、又は血液若しくは体液などを採取すること。

【使用方法等】

<使用方法>

- ① 製品のゲージ数を確認後、包装ブリスターパックを開けて注射針を取り出す。
- ② 針基を注射筒の先端に差込み、キャップを外す。
- ③ 針管を施術部位に対し、穿刺する。

* <使用方法等に関連する使用上の注意>

使用前にシリンジ内のエア抜きを必ず行い、詰まりや異常がある場合は使用しないこと。

【使用上の注意】

1. 不適切な使用は汚染を引き起こすので本書の使用方法等に従って使用すること。
2. 包装を開封したらすぐに使用し、使用後は感染防止に留意して安全な方法で処分すること。
3. 包装が破損・汚損している場合や製品に破損、変形等の異常が認められる場合は使用しないこと。
4. リキャップする必要がある場合、針刺しを防止するため、保護具等を使用するか、キャップを手で持たずに台等に置いて、キャップをまっすぐに被せる、又は片手すくい上げ法を行うこと。
5. 針管に直接手を触れないこと。

6. 針管先端に変形・損傷・汚損等がある場合は使用しないこと。
7. 目的穿刺部位及び穿刺深さにより、適切な針管の外径及び長さの製品を選定すること。

【保管方法及び有効期間等】

〔保管方法〕

水濡れに注意し、高温・多湿および直射日光を避けて衛生的環境で保管すること。

〔有効期間〕

表示ラベル参照

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

〔選任製造販売業者〕

**** 株式会社日本生物製剤**

TEL:03-3481-6061(代表)

〔製造業者〕

FEEL TECH CO.,LTD.(大韓民国)