

歯科材料 09 歯科用研削材料  
一般医療機器 歯面研磨材（70904000）

## ジーシー PTCペースト ルシェロホワイト

### 【禁忌・禁止】

本品又は本品に含まれるパラベンなどの成分に対し、発疹、皮膚炎等の過敏症の既往歴のある患者には使用しないこと。

### 【形状・構造及び原理等】

形状：ペースト状

成分：炭酸カルシウム(Lime粒子®)、ポリエチレングリコール400、モノフルオロリン酸ナトリウム、濃グリセリン、パラベン、黄色4号、青色1号、香料（グリーンシトラス）、その他

原理：ペースト状の研磨材により、歯面を物理的に清掃、研磨をする。

### 【使用目的又は効果】

ペースト状の研磨材で、歯科衛生士、歯科医師等が歯面の清掃及び研磨に用いる。

### 【使用方法等】

- 1) 本品を適量取り出します。
- 2) 取り出した本品を、ブラシ又はカップ等で適量を歯面に塗布し、研磨します。
- 3) 研磨終了後洗浄し、本品を洗い流します。

### 【使用方法等に関連する使用上の注意】

- 1) 高速回転で使用するとペーストが飛び散る恐れがあるので、2000回転数/分以下で使用する。
- 2) ハンドピースは、ハンドピースメーカーの指示に従って使用すること。
- 3) 研磨用使用する器具は、各メーカーの指示に従って使用すること。
- 4) 術者はグローブを使用すること。
- 5) 一度取り出したペーストは、他の患者に使用しないこと。  
また、取り出したペーストは、残っていてもチューブに戻さず廃棄すること。
- 6) 強固なステインの場合は、あらかじめスケーラーなどで除去してから使用すること。

### 【使用上の注意】

- 1) 使用注意（次の患者には慎重に適用すること）  
薬剤、食品、アクセサリ、化学物質等に過敏症の既往歴がある患者には、本品及び類似品に対して過敏症歴がなくても問診を行い、慎重に適用すること。
- 2) 重要な基本的注意
  - ① 本品の使用により、発疹、皮膚炎などの過敏症状が現れた患者には、使用を中止し、医師の診察を受けさせること。
  - ② 本品の使用により、吐き気、胃痛などその他の症状が現れた患者には、使用を中止し、医師の診察を受けさせること。
  - ③ 本品が眼に入った場合は、すぐに大量の流水で洗浄し、眼科医の診察を受けさせること。
  - ④ 本品を使用して歯面を研磨する際には、眼に入るのを防ぐために、術者及び患者は保護メガネ等を使用すること。
  - ⑤ 本品は【使用目的又は効果】の項に記載の用途以外には使用しないこと。
  - ⑥ 本品は、歯科医療有資格者以外は使用しないこと。

### 【保管方法及び有効期間等】

#### 〔保管方法〕

- ① 本品は、直射日光の当たらない涼しい場所(室温)で保管する。
- ② 本品は、歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理する。
- ③ ペーストを適量取り出した後、蓋をきちんと閉め、なるべく早めに使い切る。

#### 〔有効期間〕\*

包材に記載

(チューブシール部及び個装箱上蓋部刻印、パウチの下部に印刷。  
例示 XXXX. YY は XXXX 年 YY 月を示す)

### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元：日本ゼトック株式会社  
住所：〒163-0512  
東京都新宿区西新宿 1 丁目 26 番 2 号

発売元：株式会社ジーシー  
住所：〒113-0033  
東京都文京区本郷 3 丁目 2 番 14 号  
電話番号：(お客様窓口) 0120-416480