

機械器具 74 医薬品注入器

管理医療機器 自然落下式・ポンプ接続兼用輸液セット 70371000

プラネクタ輸液セット

再使用禁止

** (S F クリップあり)

【禁忌・禁止】

再使用禁止

〈併用医療機器〉

SFクリップ機能を使用する場合は、SFクリップ機構部を有する本品専用のキュアセンス輸液ポンプ(以下「SFクリップ専用ポンプ」という。)以外での組み合わせで使用しないこと。[SFクリップ機能が正常に機能しない。]


〈使用方法〉

1. SFクリップを閉じたまま、SFクリップをずらさないこと。
[チューブが伸びる、又は傷つくおそれがある。]
2. SFクリップを取り外さないこと。[SFクリップ機能が正常に機能しない。]


【形状・構造及び原理等】

*〈構造図（代表図）〉

** (定量筒なし規格)

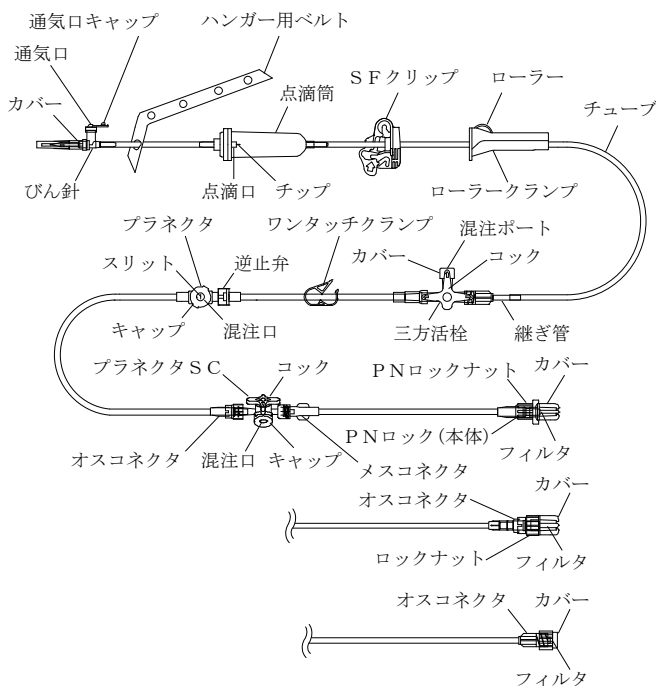

** (定量筒あり規格)

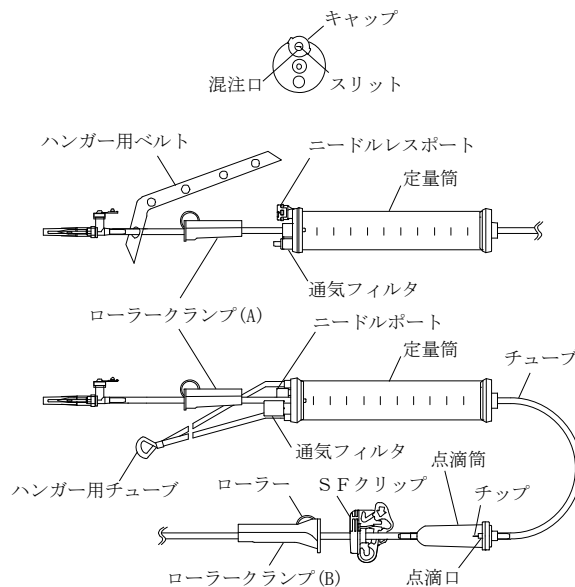

- * プラネクタは混注口の数により、プラネクタ、プラネクタ二連マニホールド、プラネクタ三連マニホールドがある。
- * プラネクタSCはコック及び混注口の数により、プラネクタSC、プラネクタSC二連マニホールド、プラネクタSC三連マニホールドがある。

**〈原材料〉

構成部品	原材料
びん針 ^{*1}	ポリカーボネート、ポリプロピレン、ポリテトラフルオロエチレン、ポリエチレン
点滴筒	ステンレス鋼、ポリブタジエン、ポリプロピレン
定量筒 ^{*1}	アクリロニトリルブタジエンスチレン共重合体、イソpreneゴム、ポリカーボネート
チューブ	ポリブタジエン、ポリ塩化ビニル ^{*2}
オスコネクタ	ポリカーボネート、ポリプロピレン
PNロック(本体)	ポリカーボネート、ポリプロピレン
メスコネクタ	ポリカーボネート、ポリプロピレン
継ぎ管	ポリブタジエン、ポリ塩化ビニル ^{*2}
フィルタ	ポリエチレンテレフタレート、ポリカーボネート、ポリプロピレン
三方活栓 ^{*1}	ポリエチレン、ポリカーボネート、ポリプロピレン
ブラネクタSC ^{*1}	イソpreneゴム、ポリエチレン、ポリカーボネート
ブラネクタ ^{*1}	イソpreneゴム、ポリカーボネート、ポリプロピレン
逆止弁 ^{*1}	シリコーンゴム、ポリカーボネート、ポリプロピレン

*※1 潤滑剤としてシリコンオイルを塗布する場合がある。

※2 ポリ塩化ビニル(可塑剤：トリメリット酸トリ(2-エチルヘキシル))を使用している。

*〈仕様〉

項目		性能
耐圧性	ポンプ加圧部	200kPa
	ポンプ非加圧部	-20～50kPa
引張強度		15N

〈原理〉

薬液容器と患者に導入された医療機器との間を接続することにより、患者に輸液を輸注するための機器である。また、SFクリップは、SFクリップ専用ポンプと組み合わせることで、フリーフローを防止するためのものである。

【使用目的又は効果】


本品は、注射用医薬品を注入するための器具である。

【使用方法等】

1. プライミング及び輸液

** (定量筒なし規格)

- (1) 包装から本品を取り出します。
- (2) SFクリップが開いていることを確認します(図 1)。SFクリップ専用ポンプを使用しない場合は、SFクリップを閉じる必要がないので、衝撃によるSFクリップの破損や誤作動を避けるため、点滴筒に突き当たる位置にSFクリップを移動、又はあることを確認します。

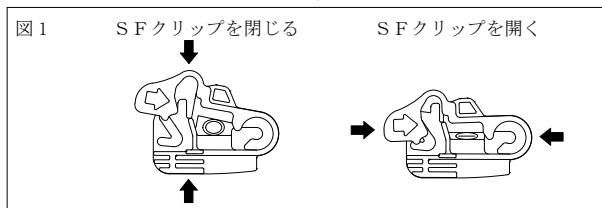

- ※(3) 本品のローラークランプを完全に閉め、びん針のカバーを外します。
- ** (4) 薬液容器のゴム栓の所定の位置に、びん針をびん針段差部に突き当たる深さまで垂直に刺通し、薬液容器をガートルスタンドにかけます。
- ** (5) ハンガー用ベルト付の場合は、ハンガー用ベルトをガートルスタンドにかけ、長さを調節します。
- ** (6) 点滴筒を軽く指で押し離し、点滴筒の半分程度まで薬液をためます。
- ※(7) 薬液容器の所定の位置にエア針を垂直に刺通します。通気口付びん針の場合は、エア針は不要ですが、ソフトバッグ又は連結管を使用して複数の薬液にて輸液を行う場合、びん針の通気口キャップを閉じます。
- ※(8) ローラークランプを緩めて点滴筒下部のチューブ及び構成部品に薬液を完全に満たします。
- ** (9) ブラネクタSC付製品は、混注口を下向きにし、コックが三方向に通じた状態(図a又は図f)でプライミングを行います。通常(混注しない場合でも)、コックを三方向に通じた状態(図a又は図f)に保ちます。
- ※(10) ライン内の空気が完全に抜けたことを確認し、ローラークランプを完全に閉じます。
- ※(11) 先端のカバーを外し、他の医療機器と確実に接続します。
PNロックタイプの場合は、PNロックのカバーを外し、PNロックのルアー部を他の医療機器のブラネクタ※3の混注口にまっすぐ押し込みます。押し込んだ状態でPNロックナットを右に回転させ、ブラネクタの突起(ツメ)と接続します。
接続できた場合は、カチッと音がします。※4
- (12) 次のとおり輸液を開始します。
 - 1) SFクリップ専用ポンプの場合
 - ※① SFクリップが開いていることを確認し(図 1)、SFクリップを下部に移動させます。SFクリップ専用ポンプのSFクリップ機構部にSFクリップを挿入し、チューブをポンプのチューブ装着部にセットします。
 - ※② ローラークランプを開き、ポンプを作動させます。
 - 2) SFクリップ専用ポンプではない(通常の輸液ポンプ)場合
 - ① チューブを輸液ポンプのチューブ装着部にセットします。
 - ※② ローラークランプを開き、ポンプを作動させます。

- ※(3) 輸液ポンプを使用しないで、自然落下式輸液を行う場合
ローラークランプを徐々に緩め、点滴状態を注視しながら速度を調節し、輸液を開始します。

** (定量筒あり規格)

- (1) 包装から本品を取り出します。
- (2) SFクリップが開いていることを確認します(図 1)。SFクリップ専用ポンプを使用しない場合は、SFクリップを閉じる必要がないので、衝撃によるSFクリップの破損や誤作動を避けるため、点滴筒に突き当たる位置にSFクリップを移動、又はあることを確認します。
- ※(3) 定量筒上部のローラークランプ(A)及び下部のローラークランプ(B)を完全に閉め、びん針のカバーを外します。
- ** (4) 薬液容器のゴム栓の所定の位置に、びん針をびん針段差部に突き当たる深さまで垂直に刺通し、薬液容器をガートルスタンドにかけます。
- ** (5) 定量筒上部のハンガー用ベルト又はハンガー用チューブをガートルスタンドにかけ、長さを調節し、本品の重量を支えるようにします。
- ※(6) 薬液容器の所定の位置にエア針を垂直に刺通します。通気口付びん針の場合、エア針は不要ですが、ソフトバッグ又は連結管を使用して複数の薬液にて輸液を行う場合は、びん針の通気口キャップを閉じます。
- ※(7) 定量筒上部のローラークランプ(A)を緩め、薬液を必要量だけ定量筒に移し、ローラークランプ(A)を閉めます。
- ※(8) 点滴筒を軽く指で押し離し、点滴筒の半分程度まで薬液をためます。
- ※(9) ローラークランプ(B)を緩めて、点滴筒下部のチューブ及び構成部品に薬液を完全に満たします。
- ** (10) ブラネクタSC付製品は、混注口を下向きにし、コックが三方向に通じた状態(図a又は図f)でプライミングを行います。通常(混注しない場合でも)、コックを三方向に通じた状態(図a又は図f)に保ちます。
- ※(11) ライン内の空気が完全に抜けたことを確認し、ローラークランプ(B)を完全に閉じます。
- ※(12) 先端のカバーを外し、他の医療機器と確実に接続します。
PNロックタイプの場合は、PNロックのカバーを外し、PNロックのルアー部を他の医療機器のブラネクタ※3の混注口にまっすぐ押し込みます。押し込んだ状態でPNロックナットを右に回転させ、ブラネクタの突起(ツメ)と接続します。
接続できた場合は、カチッと音がします。※4
- (13) 次のとおり輸液を開始します。
 - 1) SFクリップ専用ポンプの場合
 - ※① SFクリップが開いていることを確認し(図 1)、SFクリップを下部に移動させます。SFクリップ専用ポンプのSFクリップ機構部にSFクリップを挿入し、チューブをポンプのチューブ装着部にセットします。
 - ※② ローラークランプ(B)を開き、ポンプを作動させます。
 - 2) SFクリップ専用ポンプではない(通常の輸液ポンプ)場合
 - ① チューブを輸液ポンプのチューブ装着部にセットします。
 - ※② ローラークランプ(B)を開き、ポンプを作動させます。
 - 3) 輸液ポンプを使用しないで、自然落下式輸液を行う場合
ローラークランプ(B)を徐々に緩め、点滴状態を注視しながら速度を調節し、輸液を開始します。
- ※(14) 定量筒内の薬液量が足りない場合は、ローラークランプ(A)を緩め、必要量に調節し、ローラークランプ(A)を閉めます。

※3 ブラネクタはニードルレスの混注部位を有する以下の構成部品の総称です。

〔構成部品〕

ブラネクタ、ブラネクタ二連マニホールド、ブラネクタ三連マニホールド、ブラネクタSC、ブラネクタSC二連マニホールド、ブラネクタSC三連マニホールド、P

Nプラグ

****※4** PNロックはプラネクタとの接続専用ですが、PNロックナットを後方にスライドできる製品はおすルアーテーパ(ロックなし)として他の医療機器のめすルアーテーパと接続することが可能です。

2. SFクリップ専用ポンプ装着位置のずらし方

- **※(1)** 点滴筒下部のローラークランプ又はローラークランプ(B)を閉じ、チューブ及びSFクリップをSFクリップ専用ポンプから外します。
- (2) SFクリップの矢印マーク(➤)を押して開き(図1)、チューブのSFクリップ及びポンプの装着位置を元の位置からずらし、再度ポンプにセットします。

3. 定量筒の混注口からの混注

[混注口がニードルポートの場合]

- (1) 消毒用アルコール綿等で混注口を消毒します。
- (2) 混注口に注射針等を垂直に刺通し、混注を行います。
- (3) 混注後は、消毒用アルコール綿等で混注口に付着した薬液をふきとります。

[混注口がニードルレスポートの場合]

- (1) 消毒用アルコール綿等で混注口及びキャップ天面を消毒します。
- **※(2)** 混注口にシリンジのおすルアーテーパ(ロックなし)を垂直に挿入し、シリンジ本体が止まるまで確実に押し込み、混注を行います。
- **※(3)** 混注後は、消毒用アルコール綿等で混注口及びキャップ天面に付着した薬液をふきとります。

**4. 三方活栓からの混注又は吸引

- **※(1)** 混注ポート側がOFF(図d、図e、図i又は図j)であることを確認し、カバーを外します。
- **※(2)** 消毒用アルコール綿等で混注ポートを消毒します。
- **※(3)** 他の医療機器のおすルアーテーパを確実に接続します。
- **※(4)** コックの向きを目的の方向に操作し、ゆっくりと混注又は吸引を行います。
- **※(5)** 混注又は吸引後、必要に応じて生理食塩液等でフラッシュを行います。輸液を再開する場合は、混注ポート側をOFF(図d又は図i)にします。
- (6) カバーを装着します。

**5. プラネクタ、プラネクタSCからの混注又は吸引

- (1) 消毒用アルコール綿等で混注口及びキャップ天面を消毒します。
- **※(2)** 次のいずれかの方法で混注又は吸引を行います。
- **※1** シリンジ(おすルアーテーパ(ロックなし)のもの)を使用する場合
- **※①** 混注口にシリンジのおすルアーテーパ(ロックなし)を垂直に挿入し、先端が止まるまで確実に押し込みます。プラネクタSCの場合、事前に混注口側をOFF(図d、図e、図i又は図j)にしておきます。
- **※②** ゆっくりと混注又は吸引を行います。プラネクタSCの場合、コックの向きを目的の方向に操作し、ゆっくりと混注又は吸引を行います。
- **※③** プラネクタ又はプラネクタSCの本体を把持し、シリンジを取り外します。
- **※2** PNロックを使用する場合
- **※①** 専用セットのPNロックのカバーを外し、PNロックのルーア一部を混注口にまっすぐ押し込みます。押し込んだ状態で右に回転させ、プラネクタ又はプラネクタSCの突起(ツメ)と接続します。接続できた場合は、カチッと音がします。プラネクタSCの場合、事前に混注口側をOFF(図d、図e、図i又は図j)にしておきます。

****※②** 接続した専用セットから混注又は吸引を行います。プラネクタSCの場合、コックの向きを目的の方向に操作し、混注又は吸引を行います。


****※③** プラネクタ又はプラネクタSCの本体を把持し、PNロックを押し込んだ状態で左に回転させ、ゆっくり外します。

****※(3)** シリンジ又はPNロックを取り外した後、消毒用アルコール綿等で本品の混注口及びキャップ天面に付着した薬液等をふきとります。

****※(4)** 必要に応じて、本品及びライン内の薬液等を生理食塩液等でフラッシュし、再び(3)の操作を行います。なお、プラネクタSCで輸液を再開する場合は、三方向に通じた状態(図a又は図f)にします。


****※6.** 三方活栓、プラネクタSCのコック向きによる流路方向
下図の矢印方向に流路が開きます。全方向の流路を閉じる場合は、図e又は図jのように、コックを45°の位置にします。

****※(1)** スリーバートタイプ

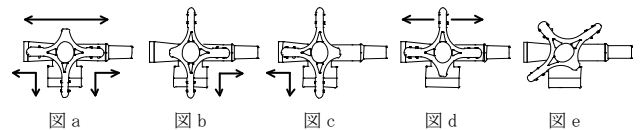

****※(2)** ワンバートタイプ

(※5 三方活栓のコックは図fの方向には動かない。)

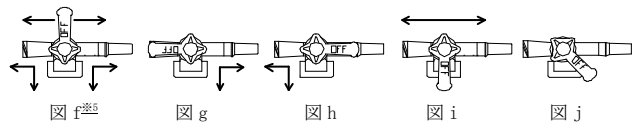

7. 点滴量(滴下数)

包装又は箱の点滴量表示を参照のこと。

〈組み合わせて使用する医療機器〉

SFクリップ機能を使用する場合は、キュアセンス輸液ポンプIP-100(承認番号30100BZX00139000)と組み合わせて使用します。

〈使用方法等に関連する使用上の注意〉

*1. プライミングについて

- (1) 個包装を開封する際は、はさみ等の刃物を使用しないこと。
[本品を傷つけ、液漏れが生じるおそれがある。]
- (2) 開封時は接続部の緩みや外れがないことを確認してから使用すること。
- (3) 薬液容器のゴム栓にびん針を刺通する際は、次の事項に注意すること。
- 1) びん針を斜めに刺通したり、刺通中に横方向への力を加えたりしないこと。[びん針の曲がり、破損が生じるおそれがある。]
- 2) ゴム栓への刺通はゆっくり、まっすぐ行い、同一箇所を繰り返し刺通しないこと。[刺通部分を削り、針管内に詰まりが生じる、又はゴム片が混入するおそれがある。]
- *3) びん針の段差部分までゴム栓に刺通すること。[刺通不十分な場合、外れ、空気混入等が生じるおそれがある。]
- (4) エア針が必要な薬液容器の場合は、次の事項に注意すること。
- *1) びん針の通気口キャップを開けて使用すること。
- *2) 連結管を使用する場合はびん針の通気口キャップを閉じ、連結先の薬液容器にエア針を刺通すること。[びん針の通気口キャップを開けて使用した場合、連結先の薬液が残存するおそれがある。]
- *5) エア針が不要な薬液容器の場合は、びん針の通気口キャップを閉じて使用すること。[びん針の通気口キャップを開けて使用した場合、本品内に空気が混入するおそれがある。]
- *6) びん針の通気口キャップを閉じる場合は、通気口と通気口キ

ャップの凸部の位置を合わせてから押し込むこと。[位置がずれた状態で押し込んだ場合、通気口付近に破損が生じ、気密性が保てなくなるおそれがある。]

(7) 点滴筒については、次の事項に注意すること。

- 1) 薬液は室温になじませてから使用すること。点滴筒内が泡立つようなプライミング操作を行わないこと。併用する医薬品及び医療機器の添付文書に指定がない場合は、点滴筒の半分程度まで薬液をため、液面低下に注意すること。[ライン内に空気が発生、混入するおそれがある。]
- 2) プライミング後、点滴筒を横にしたり、傾けたりしないこと。また、薬液容器を交換する際、及び輸液中は点滴筒内を空にしないこと。[ライン内に空気が混入し、薬液が流れにくくなるおそれがある。]
- (8) プライミングの際は、プラネクタ S C の混注口を下側に向けること。[混注口の空気が残存するおそれがある。]

2. 他の医療機器との接続について

コネクタを他の医療機器と接続する場合は、次の事項に注意すること。

- (1) 過度な締めつけをしないこと。[コネクタが外れない、又はコネクタが破損するおそれがある。]
- * (2) コネクタのテーパ部に薬液等が可能な限り付着しないように注意すること。[接続部に緩み等が生じるおそれがある。]
- * (3) ロックナットがある場合は、ロックナットの傾きや回転不足に注意し、確実に接続すること。[接続不十分な場合、外れ、液漏れ及び空気混入が生じるおそれがある。]

*3. 混注又は吸引操作について

[全共通]

- * (1) 混注口及びキャップ天面、混注ポートは混注又は吸引前に消毒用アルコール綿等で消毒すること。[細菌混入のおそれがある。]
- * (2) 他の医療機器を混注口又は混注ポートに接続する際は、混注口又は混注ポートの本体を把持すること。[十分な力が加わらず接続できないおそれがある。]
- * (3) 他の医療機器を混注口又は混注ポートから外す際は、混注口又は混注ポート本体を把持し、他の接続部が緩まないように注意すること。
- * (4) プラネクタ S C の混注口又は三方活栓の混注ポートに他の医療機器を接続する場合、接続前に混注口側の流路を閉じること。[薬液が意図しない方向へボラス注入されるおそれがある。]
- * (5) シリンジ等で混注又は吸引を行う場合は、ゆっくりと操作すること。[破損、液漏れ、空気混入が生じるおそれがある。]
- * (6) 血管造影剤等の高压注入には使用しないこと。[液漏れ又は破損が生じるおそれがある。]
- * (7) 三方活栓及びプラネクタ S C のコックに対し、引き抜く方向に過度な負荷を加えないこと。[コックが外れ、液漏れが生じるおそれがある。]
- * (8) ワンバータイプの三方活栓を使用する場合は、コックを 180° 以上回転させないこと。[コックが浮き上がり、液漏れが生じるおそれがある。]
- * (9) シリンジをプラネクタの混注口又は三方活栓の混注ポートに接続したままの状態では放置しないこと。[他の混注口又は混注ポートから薬液を投与する際、シリンジ内に薬液が逆流し、シリンジの押子が外れるおそれがある。また、シリンジ内の薬液を過量投与するおそれがある。]

[プラネクタ、定量筒のニードルレスポート共通]

- (1) 混注口の消毒剤にポビドンヨードを使用しないこと。[ポビドンヨードの析出物がスリットに侵入し、プラネクタは液漏れ、ニードルレスポートは空気流入が生じるおそれがある。]

- * (2) 混注口へ注射針を用いて混注等しないこと。[混注口を破損させ、プラネクタは液漏れ、空気混入、定量筒のニードルレスポートは空気流入が生じるおそれがある。]

*[プラネクタのみ]

- (1) P N ロックをプラネクタに接続する際は、ルアー部をまっすぐ押し込んだ状態でカチッと音がするまで P N ロックナットを回転させること。[接続が不十分な場合、外れ、液漏れ又は空気混入が生じる。]
- (2) プラネクタから P N ロックを外す際は、P N ロックナットを把持し、押しつけながら左に回転させて外すこと。[P N ロックナットを引っ張りながら回すと、プラネクタの突起(ツメ)が削れ、ロックの固定ができなくなるおそれがある。]
- (3) プラネクタを鉗子等でたいたり、衝撃を与えたりしないこと。[キャップ等が破損するおそれがある。]
- (4) プラネクタと P N ロックの接続部には、横方向に過度な負荷を加えないこと。[キャップ又は各接続部が外れるおそれがある。]
- * (5) プラネクタ S C のコックは、混注しない場合でもすべての流路が開いた位置(図 a 又は図 f)に保つこと。[薬液等が滞留するおそれがある。]
- * (6) 必要に応じて混注口内の空気を抜くこと。[混注口にシリンジ等を接続する際に空気が混入するおそれがある。]

[定量筒のニードルポートのみ]

定量筒のニードルポートの混注口から注射針を用いて薬液を注入する場合は、混注口の中心部にまっすぐ刺通し、針先を本品内部に接触させないように注意すること。[定量筒の側壁を削り、破片が定量筒内に入るおそれがある。]

4. S F クリップについて

- (1) S F クリップを操作する前に必ずクランプを閉じること。通常の輸液の停止には S F クリップではなく、クランプを用いること。[クランプ同等の開閉機能を有するものではない。また、S F クリップの頻繁な開閉により破損するおそれがある。]
- (2) 点滴筒とチューブの接合部で S F クリップを閉じないこと。[S F クリップが破損及びチューブに亀裂が生じるおそれがある。]
- (3) S F クリップに衝撃を与えないこと。[閉じた S F クリップが衝撃により開く等の誤作動のおそれがある。]
- (4) S F クリップが貯蔵保管中及び使用中に必要な以上に長時間閉じた状態にならないよう注意すること。[S F クリップによるチューブの圧閉により、チューブ変形のおそれがある。]

5. クランプ操作について

- * (1) 鉗子及びクランプはチューブと硬質部品の接合部では操作しないこと。[チューブが噛み込まれ、破損する、又は接合部が外れるおそれがある。]
- (2) チューブを鉗子等で傷つけないよう注意すること。[鉗子の根元又は先端で閉塞すると、チューブが破損し液漏れ、空気混入等が生じるおそれがある。]
- * (3) 鉗子及びクランプを使用した場合は、輸液再開時にクランプ部分のチューブの閉塞、変形に注意すること。
- * (4) ローラークランプの調節を行う際は、ローラーに対して斜め方向に力を加えないこと。[ローラーの破損や脱輪が生じるおそれがある。]
- * (5) 本品を輸液ポンプに装着しない状態で、ローラークランプで流量を調節、又は閉じた後に、チューブを引っ張る、患者の身体の下に挟まれる等、ローラークランプが動くような過度な負荷をかけないこと。[流量が変化する、又はフリーフローとなるおそれがある。]


- *6. フィルタについて
フィルタに詰まりがないことを定期的に確認すること。[医薬品の配合変化、析出物、血液の逆流等により詰まりが生じるおそれがある。]

7. 点滴量について

- (1) 輸液開始時には、輸液状態(滴の落下、点滴筒内の液面、輸液の減り具合)を必ず確認すること。また、輸液中にも同様な確認を定期的に行うこと。
 - (2) 医薬品の種類により、一滴あたりの容積が変わるおそれがあるので注意すること。
- * (3) 点滴量が $1 \pm 0.1 \text{ mL} = 60$ 滴の場合、点滴口のチップの外表面に薬液を付着させないこと。[薬液によりチップの外表面が親水化され、一滴あたりの容積が大きくなり、過量投与が生じるおそれがある。]
- #### 8. 輸液ポンプとの併用について
- (1) 輸液ポンプにチューブを装着する場合は、チューブが曲がったり、伸びたりした状態で装着しないこと。[ポンプの機能が正常に働かないおそれがある。]
 - (2) 輸液ポンプを用いて輸液を行う場合、24時間おきにチューブのポンプ装着部をずらすか新しい輸液セットと交換すること。[チューブが変形して流量が不正確になる、又はチューブが破損するおそれがある。]
- * (3) 輸液ポンプ使用中にワンショット投与する際は、輸液ポンプを一時停止し、投与終了後、再開すること。

9. 逆止弁について

- * (1) 逆止弁付の製品を使用する場合は、逆止弁の入口を患者の穿刺部より高い位置にすること。[逆流が生じるおそれがある。]
- (2) 回転機能を有する逆止弁のメスコネクタにオスコネクタを接続する、又はチューブのねじれを修正する場合には、逆止弁の指定部を持つこと(図2)。[指定部以外を持った場合、部品の回転により十分なロックかん合ができないおそれがある。]

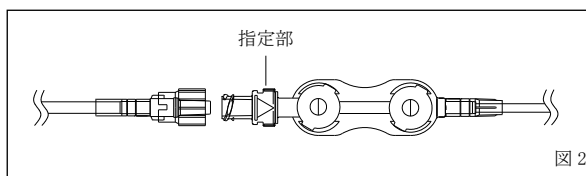

10. 定量筒について

- (1) 定量筒を強く押さえたり衝撃を加えたりしないこと。[亀裂が入り、液漏れが生じるおそれがある。]
- (2) 定量筒を傾けたり、横にしたりすると、通気口内部にある通気フィルタに薬液等が付着し、通気不良が生じるおそれがあるため注意すること。

【使用上の注意】 〈重要な基本的注意〉

1. チューブの接合部を曲げたり、チューブを過度に引っ張ったり、押し込むような負荷がかからないようにすること。[接合部の外れ及び液漏れ、チューブの破損等が生じるおそれがある。]
2. 使用中は本品が患者の下敷き又はガートルスタンド等に引っかかることがないように注意すること。[チューブ接合部の外れ又は構成部品の破損等により、液漏れ又は空気混入等が生じるおそれがある。]
- *3. プラネクタ等が連結されている製品やプラネクタ三連マニホールドが使用されている場合は、必要に応じて固定用のPNホルダーを使用すること。
4. 使用中はコネクタの接続の緩み、液漏れ及び破損等に注意し、定期的に確認すること。

5. ポリカーボネートを使用している構成部品については、脂肪乳剤及び脂肪乳剤を含む医薬品、ヒマシ油等の油性成分、界面活性剤又はアルコール等の溶解補助剤等を含む医薬品を投与する場合及びアルコールを含む消毒剤を使用する場合は、コネクタ等のひび割れについて注意すること。[薬液によりコネクタ等にひび割れが生じ、血液及び薬液漏れ、又は空気混入等が生じるおそれがある。特に、全身麻酔剤、昇圧剤、抗悪性腫瘍剤及び免疫抑制剤等の投与では、必要な投与量が確保されず患者への重篤な影響が生じるおそれがある。なお、ライン交換時の締め直し、過度な締めつけ及び増し締め等は、ひび割れの発生を助長する要因となる。]
6. ひび割れが確認された場合は、直ちに新しい製品と交換すること。
7. 発泡性医薬品を使用する場合は、使用中の点滴筒液面に注意すること。[液面が低下するおそれがある。]
8. SFクリップに薬液等が付着した場合は、直ちにふきとること。[SFクリップに薬液等が固着し、正しく作動しないおそれがある。脂肪乳剤及び脂肪乳剤を含む医薬品、ヒマシ油等の油性成分、界面活性剤又はアルコール等の溶解補助剤等を含む医薬品やアルコールを含む消毒剤が付着した場合、SFクリップのひび割れの発生を助長する要因となる。]
9. プライミング後は直ちに輸液を開始すること。[薬液の汚染のおそれがある。]

〈不具合・有害事象〉

1. 重大な不具合
SFクリップ機能不全、フリーフロー
- *2. その他の不具合
逆流、空気混入、漏れ、破損、欠け、曲がり、変形、固着、外れ、緩み、亀裂、過量投与、詰まり

【保管方法及び有効期間等】 〈有効期間〉

3年[自己認証(当社データ)による]
包装の使用期限欄を参照すること。

*【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者
株式会社ジェイ・エム・エス

問い合わせ先
TEL 0120-923-107