

機械器具 51 医療用嘴管及び体液誘導管
一般医療機器 輸液用アクセサリセット 70326001

アダプタキャップ

再使用禁止

【禁忌・禁止】

1. 再使用禁止

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】


製造販売業者

株式会社ジェイ・エム・エス

電話番号：082-243-5806

【形状・構造及び原理等】

<構成>

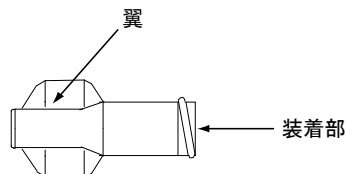

【使用目的又は効果】

輸液セットのオスアダプタ又はシリンジの先端等を被覆し、内容液の漏れを防止するのに用いる。

*【使用方法等】

1. 包装のふたを完全に剥がし、包装の外側から本品を保持します。
2. 包装（透明部分）に入った状態の本品の装着部とオスアダプタ等を軽く装着し、包装を取り外します。
- *3. 本品の翼を持ち、オスアダプタ等に回転させながら、緩みや外れが生じないように確実に装着します。
4. 使用後は、翼を持ち、回転させながら取り外します。

<使用方法等に関連する使用上の注意>

1. 包装を取り外す際、本品を強く保持しないこと。[装着したオスアダプタ等から本品が外れるおそれがある。]
2. 装着部に薬液等を付着させないこと。[装着部に緩みが生じるおそれがある。]
3. 本品を装着する際は、過度な締めつけや横方向の負荷を加えないこと。[本品が外れない、本品又は装着相手が破損するおそれがある。]
4. 本品を装着した状態で過度な負荷をかけないこと。[装着が緩み、本品が外れたり、内容液が漏れたりするおそれがある。]
- *5. 装着後は緩みがないことを確認すること。また、使用中は定期的に緩み、外れがないことを確認すること。

*【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意
 - (1) 本品に衝撃を与えないこと。[破損するおそれがある。]
 - (2) 本品を鉗子等で挟まないこと。[破損が生じ、液漏れ、エアの混入を引き起こすおそれがある。]
- * (3) 本品は菌の繁殖防止およびシリンジ等の内容液の効力維持に有効なものではない。
2. その他の注意
 - (1) 患者等が本品を誤飲しないよう注意すること。
 - (2) 装着部を直接手で触れないこと。

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法
 - (1) 水ぬれに注意し、高温、多湿、直射日光を避けて保管すること。
2. 有効期間
 - (1) 箱の使用期限欄を参照すること。[自己認証（当社データ）による]