

機械器具 51 医療用嘴管及び体液誘導管
一般医療機器 輸液用アクセサリセット 70326001

コネクタキャップ

（ハードケースタイプ）


再使用禁止

【禁忌・禁止】

再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

**〈構造図〉

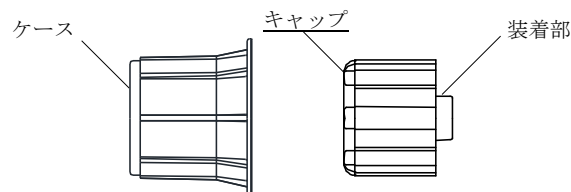

**〈原材料〉

構成部品	原材料
キャップ	ポリプロピレン

**〈原理〉

輸液セットに使用されているメスコネクタ、三方活栓の混注口等にキャップを接続することにより、内容物の漏れや汚染を防止することができる。

【使用目的又は効果】

輸液セットのメスコネクタ等を被覆し、内容物の漏れを防止するのに用いられる。

*【使用方法等】

1. ケースを手を持ち、ふたを完全に剥がす。
- *2. ケースの外側から本品を保持し、本品の装着部をメスコネクタ等のロック部に回転させながらねじ込み、メスコネクタ等の開口部に確実に装着する。
3. ケースをまっすぐ取り外す。

〈使用方法等に関連する使用上の注意〉

1. 本品をメスコネクタ等に装着する際は、過度な締めつけをしないこと。[本品が外れない、本品又は装着相手が破損するおそれがある。]
2. 本品を装着させた状態で過度な負荷をかけないこと。[装着が緩み、本品が外れたり、内容物が漏れたりするおそれがある。]

**【使用上の注意】

**〈重要な基本的注意〉

1. 本品に衝撃を与えないこと。[破損するおそれがある。]
2. 本品を鉗子等で挟まないこと。[破損が生じ、液漏れ、空気混入が生じるおそれがある。]
- *3. 本品は菌の繁殖防止及び輸液セット等の内容物の効力維持に有効なものではない。
4. 使用中は装着部の緩み、液漏れ破損等に注意すること。
5. 患者等が本品を誤飲しないよう注意すること。

**〈不具合・有害事象〉

1. その他の不具合
空気混入、漏れ、固着、外れ、緩み、破損
2. その他の有害事象
誤飲

**【保管方法及び有効期間等】

**〈有効期間〉

3 年 [自己認証(当社データ)による]
包装の使用期限欄を参照すること。

**【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者
株式会社ジェイ・エム・エス

問い合わせ先
TEL 0120-923-107