

医療用品 4 整形用品
一般医療機器 単回使用汎用サージカルドレープ 35531000

JMS 覆布


再使用禁止

【禁忌・禁止】

再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

**<構造図（代表図）>

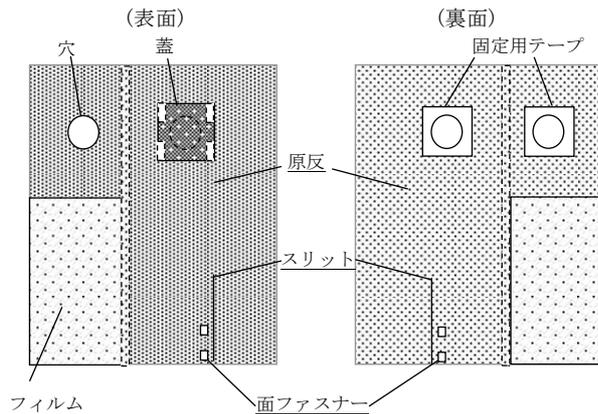

・原反構造

構造	構成
単層	不織布
二層	不織布/ラミネートフィルム
三層	不織布/ラミネートフィルム/不織布

**<原材料>

部位		原材料
原反	単層	パルプ/ポリエステル
	二層	パルプ/ポリエステル、レーヨン系不織布、レーヨン/ポリエステル、ポリエチレン
	三層	ポリプロピレン系不織布、レーヨン系不織布、レーヨン/ポリエステル
蓋	二層	ポリエチレン
	三層	ポリプロピレン系不織布
固定用テープ		アクリル系粘着剤、紙、シリコーン処理ポリエチレン紙積層体

【使用目的又は効果】

手術室やカテーテル処置室の汚染（器具やテーブルの上）から外科切開部位や術野を隔離するために、保護的なカバー又は障壁として用いる不織布製の用具をいう。本品は患者を手術中の熱、炎又は他の形態のエネルギーから保護するためにも使用する。本品は単回使用である。

【使用方法等】

1. 包装から本品を取り出す。
2. 固定用テープ付規格の場合は裏面の固定用テープの剥離紙をはがす。
- **3. 対象部位を覆う。穴がある規格の場合は、手術部位等の露出させる部分が見えるように覆い、裏面の固定用テープで固定する。

**<使用方法等に関連する使用上の注意>

固定用テープを皮膚からはがす際はゆっくり剥がすこと。

*【使用上の注意】

*<重要な基本的注意>

- **1. 本品の使用により、皮膚異常が現れた場合は直ちに使用を中止し、適切な処置をすること。
2. 可燃性消毒薬を用いる場合は、消毒薬の乾燥・気化拡散を確認したのちに、本品で対象部位を覆うこと。[乾燥・気化拡散が不十分な場合、本品下でアルコール蒸気が充満し、電気メスの使用により、引火するおそれがある。]

*<不具合・有害事象>

1. その他の不具合
引火
- **2. その他の有害事象
皮膚異常

<その他の注意>

消毒用アルコールは可能な限り、本品に付着しないよう注意すること。[本品の染料が身体に付着するおそれがある。]

【保管方法及び有効期間等】

**<有効期間>

使用期限：3年 [自己認証（当社データ）による]
包装の使用期限欄を参照すること。

**【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者
株式会社ジェイ・エム・エス

問い合わせ先
TEL 0120-923-107