

医療用品 4 整形用品
一般医療機器 単回使用汎用サージカルドレープ 35531000

JMS穴あきシート

再使用禁止

【禁忌・禁止】

再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

手術部位の清潔野の確保を目的に患者の体の一部分を覆う不織布製品である。表面：不織布／裏面：ラミネートフィルムの二層構造を有する。手術部位を露出させるための穴があいており、穴部の裏面の周囲に固定用テープが貼付されている。

・本品は以下の原材料を使用している。

部位	原材料
覆布部	ポリエチレン
固定用テープ	アクリル系粘着剤

【使用目的又は効果】

手術室やカテーテル処置室の汚染（器具やテーブルの上）から外科切開部位や術野を隔離するために、保護的なカバー又は障壁として用いる不織布製の用具をいう。本品は患者を手術中の熱、炎又は他の形態のエネルギーから保護するためにも使用する。本品は単回使用である。

【使用方法等】

1. 包装から本品を取り出します。
2. 裏面の固定用テープの剥離紙をはがします。
3. 手術部位等の露出させる部分が見えるように覆い、裏面の固定用テープで固定します。

*【使用上の注意】

*〈重要な基本的注意〉

可燃性消毒薬を用いる場合は、消毒薬の乾燥・気化拡散を確認したのちに、本品で対象部位を覆うこと。[乾燥・気化拡散が不十分な場合、本品下でアルコール蒸気が充満し、電気メスの使用により、引火するおそれがある。]

*〈不具合・有害事象〉

その他の不具合
引火

【保管方法及び有効期間等】

〈有効期間〉

3年〔自己認証（当社データ）による〕
包装の使用期限欄を参照すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者
株式会社ジェイ・エム・エス
電話番号：082-243-5806