

医療用品 4 整形用品
一般医療機器 単回使用汎用サージカルドレープ 35531000

JMS オイフパック

再使用禁止

【禁忌・禁止】

再使用禁止


****【形状・構造及び原理等】**

手術部位の清潔野の確保を目的に、患者の身体の一部を覆う不織布製品（以下に示す構成品）で、付属品を組み合わせる場合がある。不織布製品の構造は、不織布の単層構造、不織布/ラミネートフィルム/不織布の二層構造、及び不織布/ラミネートフィルム/不織布の三層構造のいずれかの構造を有する。なお、構成品及び付属品は、個別に包装した状態で他の構成品及び付属品と組み合わせる場合がある。組み合わせ内容については包装の表示に記載している。

〈構成品(代表例)〉


****1. 覆布**

原反は単層、二層、又は三層構造からなる。

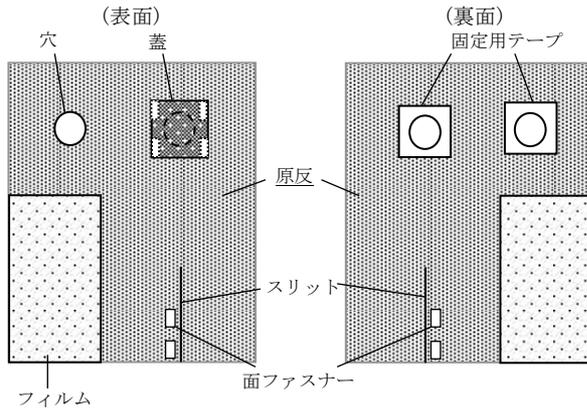

****2. 全面覆布**


原反は二層又は三層構造からなる。

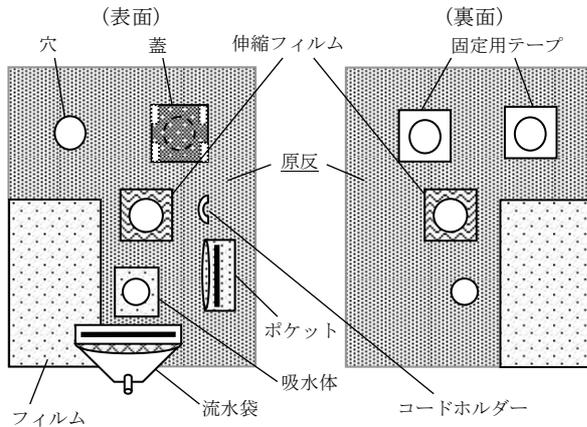

- 流水袋は患者の排液等を排出する経路を確保するものである。
- ポケットは鉗子、セッシ等小型の医療機器を一時的に収納するものである。
- コードホルダーは各種チューブ類を束ねるものである。

****3. 覆布テープ**

原反は単層又は二層構造からなる。裏面に剥離紙を有した固定用テープが貼付されている。

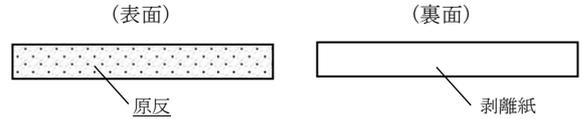

〈付属品(医療機器非該当品)〉

本書における名称	構成品名
器械台カバー	器械台カバー、器械台シート、台敷、メイヨスタンドカバー
スケール	紙スケール
ガウン	ガウン
ポケット	ポケット
マスク	マスク
キャップ	ヘアキャップ

****〈原材料〉**

構成品		原材料	
覆布	原反	単層	パルプ/ポリエステル
		二層	ポリエチレン
		三層	ポリプロピレン系不織布
	蓋	二層	ポリエチレン
		三層	ポリプロピレン系不織布
		固定用テープ	アクリル系粘着剤、紙、シリコーン処理ポリエチレン紙積層体
全面覆布	原反	二層	ポリエチレン
		三層	ポリプロピレン系不織布
		蓋	ポリエチレン
	固定用テープ	二層	ポリエチレン
		三層	ポリプロピレン系不織布
伸縮フィルム	アクリル系粘着剤、紙、シリコーン処理ポリエチレン紙積層体		
マスク	ポリプロピレン、ポリウレタン、ポリエステル、ポリエチレン		
キャップ	ポリプロピレン、レーヨン		

【使用目的又は効果】

手術室やカテーテル処置室の汚染（器具やテーブルの上）から外科切開部位や術野を隔離するために、保護的なカバー又は障壁として用いる不織布製の用具をいう。本品は患者を手術中の熱、炎又は他の形態のエネルギーから保護するためにも使用する。本品は単回使用である。

【使用方法等】

包装から本品を取り出す。

〔覆布、全面覆布〕

- 裏面の固定用テープの剥離紙をはがす。
- 対象部位を覆う。穴がある規格の場合は、手術部位等の露出させる部分が見えるように覆い、裏面の固定用テープで固定する。

〔覆布テープ〕

裏面の剥離紙をはがし、覆布に貼付し、覆布同士を貼り合わせる。

****〈使用方法等に関連する使用上の注意〉**

〔覆布、全面覆布〕

固定用テープを皮膚からはがす際はゆっくり剥がすこと。

【使用上の注意】

〈重要な基本的注意〉

〔覆布、全面覆布〕

- **1. 本品の使用により、皮膚異常が現れた場合は直ちに使用を中止し、適切な処置をすること。
- 可燃性消毒薬を用いる場合は、消毒薬の乾燥・気化拡散を確認したのちに、本品で対象部位を覆うこと。〔乾燥・気化拡散が不十分な場合、本品下でアルコール蒸気が充満し、電気メスの使用により、引火するおそれがある。〕

〈不具合・有害事象〉

- その他の不具合

〔覆布、全面覆布〕

引火

- **2. その他の有害事象

〔覆布、全面覆布〕

皮膚異常

〈その他の注意〉

〔覆布、全面覆布〕

消毒用アルコールは可能な限り、本品に付着しないように注意すること。〔本品の染料が身体に付着するおそれがある。〕

【保管方法及び有効期間等】

〈有効期間〉

3年〔自己認証（当社データ）による〕

包装の使用期限欄を参照すること。

**【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者

株式会社ジェイ・エム・エス

問い合わせ先

TEL 0120-923-107